

Dräger Savina® 300 Guia rápido

A PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO



1. Inserir válvula expiratória
2. Inserir sensor de fluxo
3. Colocar as traqueias em ambos os ramos
4. Instalar a cuvete de CO2 (opcional)
5. Instalar humidificador (opcional)
6. Conectar à rede eléctrica
7. Conectar a mangueira de oxigénio

B TESTE DO SISTEMA E DO CIRCUITO



PASSO 1

1. Premir em Início/Standby
2. Premir Teste do Aparelho



PASSO 2

1. Premir “Iniciar”
2. Confirmar com o **botão rotativo**



PASSO 3

1. Responder às perguntas que aparecem no campo de informação com **SIM/NÃO**. A ideia é ir fazendo tudo que o equipamento pede, de maneira a podermos ir respondendo SIM a todos os pontos.



PASSO 4

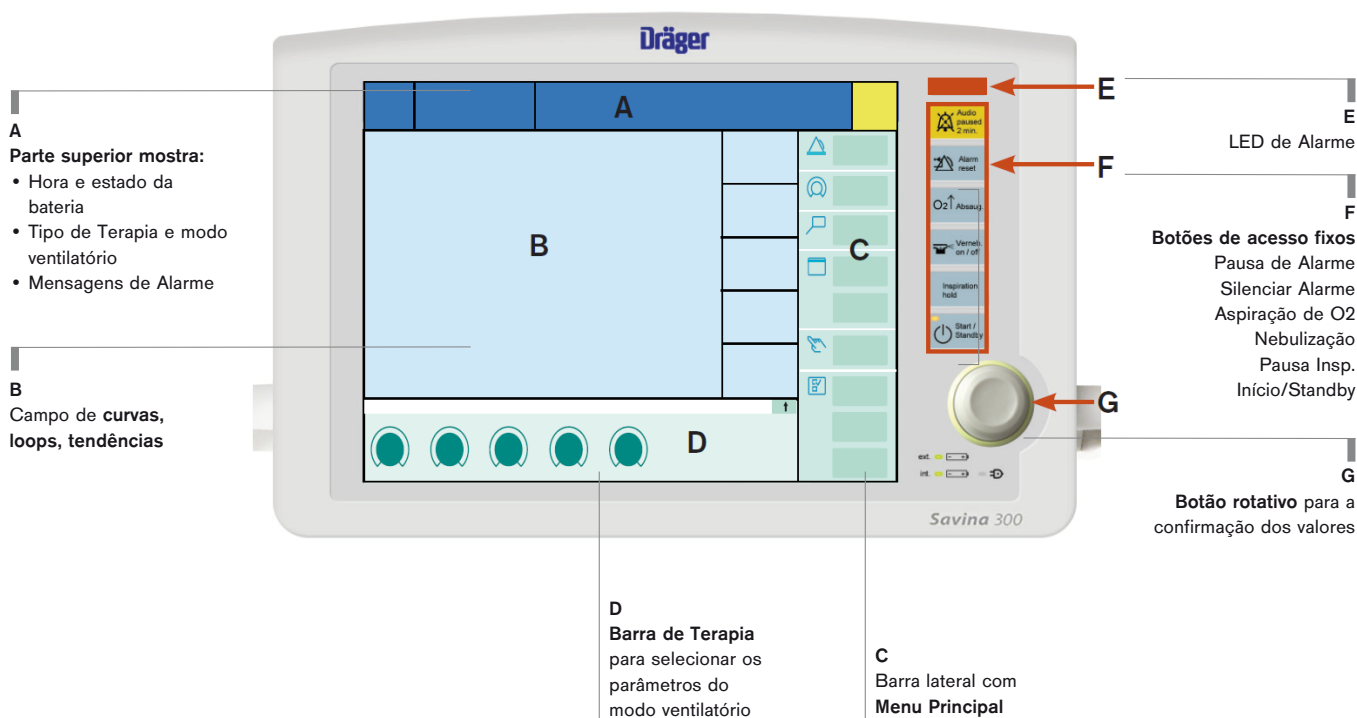
1. Todos os pontos têm que ficar **a verde**
2. Uma vez terminado o Teste, premir **Verific. do circ. resp.**



PASSO 5

1. Premir “Iniciar”
2. Confirmar com o **botão rotativo**
3. Quando solicitado pelo equipamento, manter a peça em Y tapada.
4. Quando solicitado pelo equipamento, deixar a peça em Y ao ar.

O teste do Circuito está terminado!

C ECRÃ


NOTA: Este guia rápido não substitui o manual de instruções fornecido pelo fabricante.

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemanha
 www.draeger.com

ESPAÑA
 Dräger Medical Hispania S.A.
 C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
 Tel +34 90 011 64 24
 Fax +34 91 358 36 19
 atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
 Dräger Portugal, Lda.
 Rua Nossa Senhora da
 Conceição, n.º 3, R/c
 2790-111 Carnaxide
 Tel +351 21 155 45 86
 Fax +351 21 155 45 87
 clientesportugal@draeger.com