


## Guida introduttiva – HI-Flow Star per pazienti adulti

### 1a Collegamento a un miscelatore

1. Collegare il tubo dell'O<sub>2</sub> (A) del kit del miscelatore al miscelatore (B) e alla camera per l'acqua dell'umidificatore (C).
2. Collegare il tubo inspiratorio riscaldato alla seconda apertura della camera per l'acqua.
3. Collegare gli adattatori del cavo riscaldante e i sensori di temperatura all'umidificatore e al circuito dei tubi.

Se il miscelatore viene usato con un adattatore da 22 mm (venduto separatamente), è necessario usare il tubo inspiratorio corto di colore blu anziché il tubo dell'O<sub>2</sub>.


Il tubo inspiratorio corto blu non deve essere usato per il collegamento a un miscelatore.

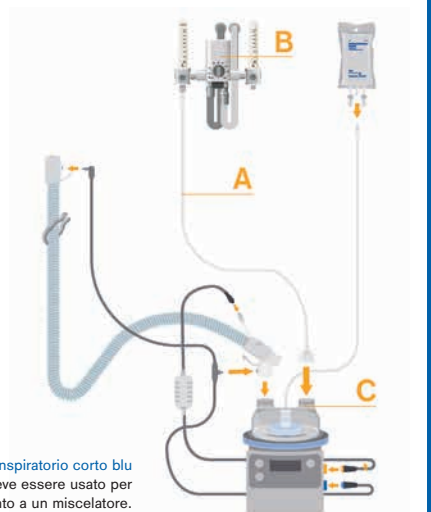

### 1b Collegamento a un ventilatore


1. Collegare il tubo inspiratorio corto blu (A) alla porta inspiratoria del ventilatore (B) e alla camera per l'acqua (C).
2. Collegare il tubo inspiratorio riscaldato alla seconda apertura della camera per l'acqua.
3. Collegare gli adattatori del cavo riscaldante e i sensori di temperatura all'umidificatore e al circuito dei tubi.

Il kit del miscelatore non deve essere usato se si effettua il collegamento a un ventilatore.

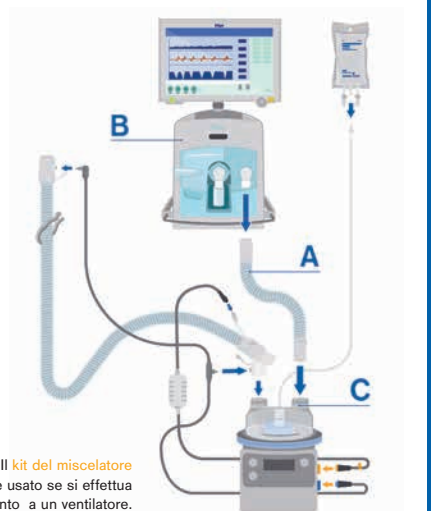

2

1. Usare la sagoma in dotazione per stabilire la misura degli occhialini. Sulla sagoma sono indicate le misure di occhialini disponibili.
2. Gli occhialini non devono occupare più del 50% delle narici.
3. Collegare la cannula nasale al tubo inspiratorio.
4. Avviare il dispositivo come indicato nelle istruzioni per l'uso e impostare i parametri. Accertarsi che dagli occhialini esca il flusso del gas di ventilazione.

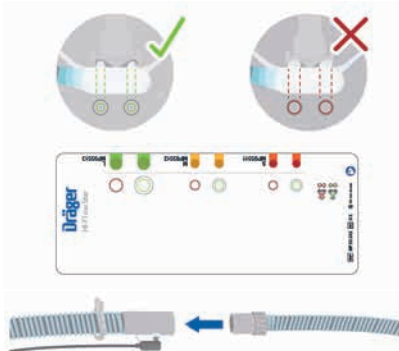

3

1. Per sistemare al meglio i tubi, assicurare l'apposita molletta agli indumenti del paziente o alla biancheria del letto.



4

1. Il tubo della cannula nasale può essere posizionato alla destra o alla sinistra del paziente.
2. Ruotare la cannula nasale in modo che il tubo della cannula sia rivolto in direzione del dispositivo.
3. Posizionare con attenzione gli occhialini nel naso del paziente e sistemare la fascia per la testa.
4. La lunghezza della fascia per la testa può essere modificata regolando il fissaggio a strappo uncino e asola.

