

Sistema respiratório Dräger Perseus® A500 Desmontagem/Montagem



Desmontagem

1 Desrosqueie o adaptador CLIC.



Encaixe o adaptador CLIC.

2 Insira o disco de limpeza no adaptador. Feche o adaptador de modo que fique preso.



Retire o disco de limpeza do adaptador. Feche o adaptador de modo que fique preso.

3 Desrosqueie e retire a conexão expiratória.



Encaixe a porta expiratória e aperte-a usando a rosca.

4 Desrosqueie e retire a conexão inspiratória.



Encaixe a conexão inspiratória e aperte-a usando a rosca.

5 Retire os sensores de fluxo.



Insira os sensores de fluxo.

6 Gire as três alavancas 120° no sentido anti-horário.



Gire as três alavancas 120° no sentido horário.

7 Levante a parte superior do sistema respiratório.



Coloque a parte superior do sistema respiratório na parte inferior.

8 Desrosqueie a válvula APL.



Alinhe a válvula APL corretamente e aperte-a usando a rosca.

9 Retire as válvulas (vermelha e azul).



Alinhe as válvulas corretamente. Insira as válvulas.

Montagem

Circuito respiratório Dräger Perseus® A500


Instruções de reprocessamento



	Limpeza e desinfecção manual	Limpeza e desinfecção a máquina	Esterilizar
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓
	✗	✓	✓

Posicione os componentes de modo que as superfícies e espaços internos possam ser completamente enxaguados e a água possa escoar livremente.

Inspeção visual

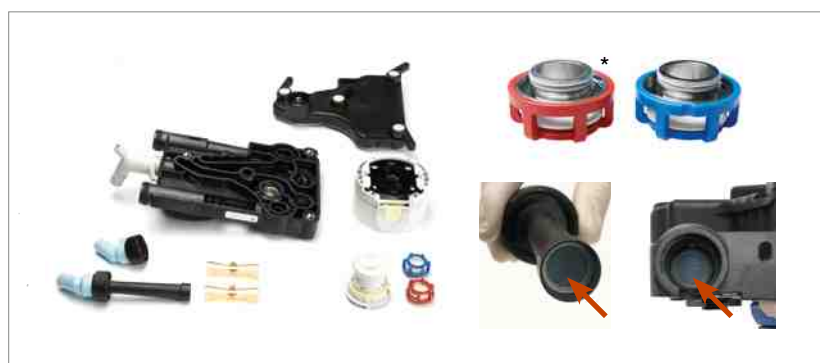

As seguintes peças devem estar livres de resíduos:

- Telas do fluxo incidente
- Válvulas antirretorno (vermelha e azul)

Se necessário, remova os resíduos nas placas das válvulas antirretorno com um pano macio. Se as telas do fluxo incidente estiverem danificadas, entre em contato com a DrägerService®.

* Para limpeza a máquina, coloque todas as válvulas com as grades voltadas para baixo.

Este guia não substitui as instruções de uso.