

Дыхательная система Dräger Perseus® A500 Порядок разборки и сборки



Разборка

1 Отвинтите CLIC адаптер.



Завинтите CLIC адаптер.

2 Вставьте чистящий диск в адаптер. Закройте адаптер до блокировки.



Извлеките чистящий диск из адаптера. Закройте адаптер до блокировки.

3 Отвинтите и извлеките порт выдоха.



Вставьте порт выдоха и закрепите гайкой с насечкой.

4 Отвинтите и извлеките порт вдоха.



Вставьте порт вдоха и закрепите гайкой с насечкой.

5 Снимите датчики потока.



Вставьте датчики потока.

6 Поверните три рычага примерно на 120° против часовой стрелки.



Поверните три рычага примерно на 120° по часовой стрелке.

7 Снимите верхнюю часть дыхательной системы.



Установите верхнюю часть дыхательной системы на нижнюю.

8 Отвинтите клапан APL.



Правильно расположите клапан APL и зафиксируйте гайкой с насечкой.

9 Снимите клапаны (красный и синий).



Правильно расположите клапаны. Вставьте клапаны.

Сборка


Дыхательная система Dräger Perseus® A500 Инструкции по повторной обработке



	Ручная очистка и дезинфекция	Автоматическая очистка и дезинфекция	Стерилизация
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓
	✗	✓	✓

Расположите элементы таким образом, чтобы обеспечить хорошее промывание внутренних пространств и поверхностей и свободный отток воды.

Визуальный осмотр

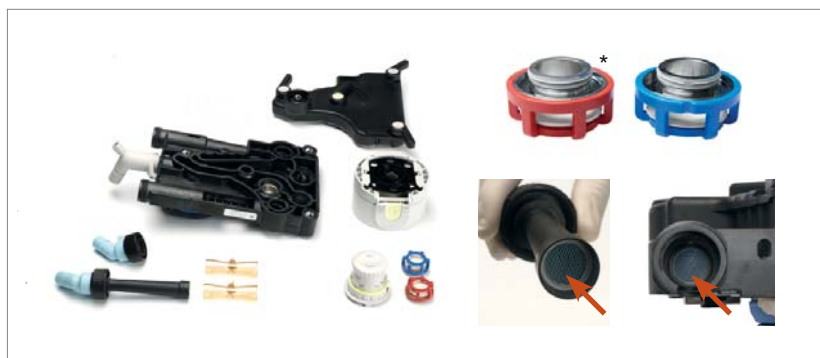

На указанных элементах должны отсутствовать отложения:
 – Решетки входящего потока
 – Невозвратные клапаны (красный и синий)

При необходимости удалите отложения на створках невозвратных клапанов мягкой тканью. Если решетки входящего потока повреждены, обратитесь в сервисную службу Dräger.

* Для автоматической очистки расположите каждый клапан таким образом, чтобы гнездо клапана находилось внизу.

Данные рекомендации не отменяют инструкции по применению и не являются ее заменой.