

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

WaterLock® 2 / Infinity ID WaterLock® 2

Подключение влагосборника


1. Достаньте новый влагосборник из упаковки.
2. Напишите текущую дату на передней части влагосборника.

ПРИМЕЧАНИЕ

Второй шаг не требуется, если влагосборник Infinity ID WaterLock 2 используется вместе с устройствами Dräger с технологией Infinity ID, поскольку максимальное время использования влагосборника контролируется автоматически.



3. Удерживая влагосборник **(A)** за рифленые захваты, вставьте его в держатель или адаптер до характерного щелчка.
4. Подсоедините линию забора газа **(B)** к порту влагосборника с насадкой Люэра.

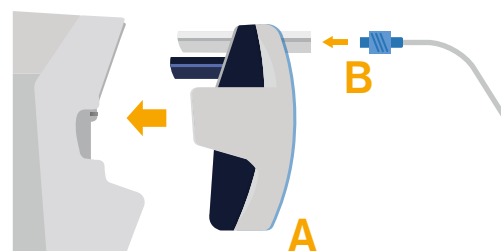

Замена влагосборника


- После достижения максимального 4-недельного периода использования.
- Если на мониторе пациента или анестезиологической рабочей станции появилось сообщение об ошибке.
- Если после опорожнения сообщение об ошибке монитора пациента или анестезиологической рабочей станции не исчезает.
- При сильном загрязнении.
- Если набухающие уплотнения в соединениях посинели.

Для подключения нового влагосборника следуйте инструкциям из главы «Подключение влагосборника» выше.


	Код заказа
WaterLock® 2, 12 шт.	6872130
Infinity ID WaterLock® 2, 12 шт.	6872020
Линия забора газа, одноразовая, 10 шт.	8290286

Опорожнение влагосборника

1. Отсоедините линию забора газа от влагосборника.
2. Нажмите на ручки влагосборника и потяните наружу.
3. Вставьте в синий соединитель пустой шприц (С) с объемом наполнения не менее 20 мл без канюли.

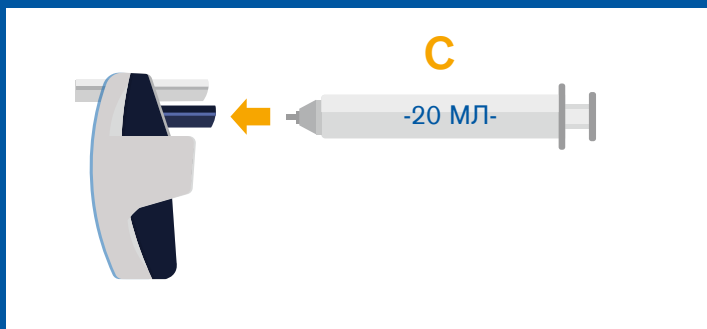

4. Откачайте воду, выньте шприц и утилизируйте шприц в комплекте как инфекционные больничные отходы.

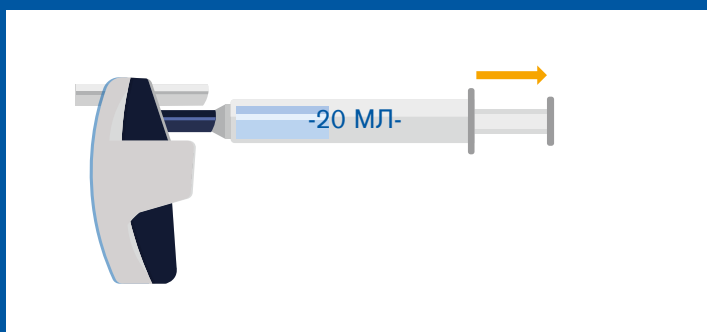

5. Снова вставьте влагосборник в держатель или адаптер, пока он не встанет на место с характерным щелчком, и подсоедините линию забора газа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск заражения



Жидкость в влагосборнике может быть загрязнена и требует осторожности при обращении и утилизации. Утилизируйте жидкость надлежащим образом, в соответствии с местным законодательством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск заражения



Если во время снятия влагосборника линия забора газа остается подключенной, загрязненная жидкость может вытекать из влагосборника. Прежде чем снимать влагосборник с медицинского устройства, отсоедините линию забора газа от водосборника.

ВНИМАНИЕ Риск из-за сбоя измерения газа



Если влагосборник полностью заполнен, измерение газа может быть неверным. Регулярно проверяйте уровень заполнения влагосборника и при необходимости опорожняйте его.