

## Dräger DrugTest 5000 Testkit

Het Dräger DrugTest 5000 systeem bestaat uit twee hoofdcomponenten: de DrugTest 5000 Testkits en de DrugTest 5000 Analyzer. Het systeem vormt een snelle, nauwkeurige methode voor het testen van speekselmonsters op drugsmisbruik, zoals (designer) amfetaminen, opiaten, cocaïne en zijn (metabolieten), benzodiazepinen, cannabinoïden, ketamine of methadon.



De DrugTest 5000 Testkits zijn ergonomisch ontworpen, bijzonder handzaam en direct klaar voor gebruik. Deze testkits bestaan uit een testcassette met een geïntegreerde speekselcollector. De testkit kan met of zonder handschoenen, zowel links- als rechtshandig worden bediend. Het systeem levert exacte, eenduidig afleesbare meetresultaten, waardoor elke kans op een verkeerde interpretatie wordt uitgesloten. Vervaardigd van onbuigzaam en poreus materiaal met capillaire eigenschappen, is dit niet-invasieve testsysteem hygiënisch in het gebruik. Elk contact met het monster en zijn bestanddelen is uitgesloten.

### **De monsterafname geschiedt in vijf simpele stappen, bedieningsfouten zijn uitgesloten.**

Het testen gaat heel eenvoudig in zijn werk: verwijder eerst het beschermkapje van de speekselcollector en overhandig de testcassette aan de testpersoon. De testpersoon neemt de collector in de mond en verzamelt bij zichzelf een speekselmonster, door de collector tussen zijn wang en tandvlees heen en weer te bewegen.

Zodra een voldoende hoeveelheid speeksel is verzameld, verkleurt de geïntegreerde indicator blauw en kan de testcassette aan de operator worden teruggegeven. De operator, die het gehele monsterafnameproces bewaakt, plaatst vervolgens de testcassette en de cartridge in de Analyzer. Na slechts enkele minuten wordt het resultaat duidelijk weergegeven. Individuele monsters kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd door de testcassette van naam en datum te voorzien.

Indien nodig, kan de Dräger DrugTest 5000 in combinatie met het speekselverzamelset Dräger DCD 5000 worden gebruikt. Dat biedt de mogelijkheid voor een tweede monsternaam en voor opslag en verzending ten behoeve van laboratoriumanalyse. In combinatie met de SSK 5000 kunnen nu ook on-site zeer betrouwbaar oppervlakten worden getest die mogelijk met drugs in aanraking zijn geweest en is het mogelijk drugsverdachte substanties te analyseren.



**Das Dräger DrugTest 5000 Testkit:** eenvoudige, snelle, betrouwbare en veilige drugstest

**BESTELINFORMATIE****Benaming**

Elke Dräger DrugTest 5000 Testkit bestaat uit een testcassette met geïntegreerde collector en een cartridge, verpakt in een verzegelde foliezak.  
Verpakkingseenheid: elk 20 complete testkits.


Benaming	Bestelnummer
Dräger DrugTest 5000 Training Testkit	83 19 970
Dräger DrugTest 5000 Testkit COC-OPI-BENZO's-THC-AMP-METH*	83 19 830
Dräger DrugTest 5000 Testkit COC-OPI-BENZO's-THC-AMP-METH-MTD*	83 23 156
Dräger DrugTest 5000 Testkit COC-OPI-THC-AMP-METH*	83 21 280
Dräger DrugTest 5000 Testkit COC-OPI-BENZO's-THC-AMP-METH-MTD-KET*	83 23 646**

\*COC: cocaïne – \*OPI: opiaten – \*BENZO's: benzodiazepinen – \*THC: tetrahydrocannabinol (cannabis) – \*AMP: amfetamine – \*METH: methamfetamine + designer amfetamine –  
\*MTD: methadon – \*KET: ketamine

\*\*Uitsluitend bestemd voor verkoop binnen de Europese Unie


**Toebehoren**

Dräger DCD 5000 speekselverzamelset	83 19 910
Dräger SSK 5000 oppervlakken-testkit	83 20 490

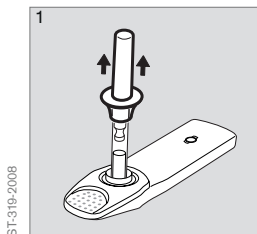**DRÄGER DRUGTEST 5000 – DE TEST WORDT IN 5 SIMPELE STAPPEN UIGEVOERD:**


ST-319-2008

Verwijder het beschermkapje

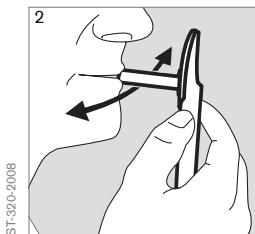


ST-320-2008

Neem de monsternamem-collector in de mond

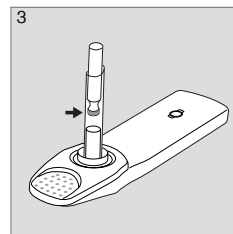


ST-321-2008

De geïntegreerde indicator verkleurt blauw

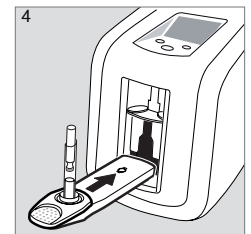

ST-322-2008

Plaats de testcassette en de cartridge in de Analyzer

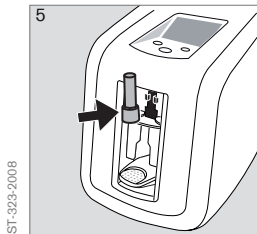

ST-323-2008

Het resultaat wordt duidelijk weergegeven.

**Opslag en houdbaarheid**

De testkits dienen bij een temperatuur tussen +4 en +30 °C in de originele verzegelde verpakking (foliezak) te worden bewaard. Gebruik geen testkit waarvan de omhullende folieverpakking beschadigd is en bijv. gaten of scheurtjes vertoont. Na het openen van de folieverpakking moet de testkit direct worden gebruikt. De testkit niet meer gebruiken wanneer de opgedrukte vervaldatum is overschreden.

**HOOFDKANTOOR**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Duitsland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NEDERLAND**

Dräger Nederland B.V.  
Huygensstraat 3-5  
2721 LT Zoetermeer  
Postbus 310  
2700 AH Zoetermeer  
Tel +31 (0)79 344 46 66  
[receptie@draeger.com](mailto:receptie@draeger.com)

Dräger Nederland B.V.  
Marine & Offshore  
Beurtschipperstraat 1  
3194 DK Hoogvliet  
Tel +31 (0)10 295 27 40  
[sales-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:sales-mo.sd.nl@draeger.com)

**BELGIË**

Dräger Safety België N.V.  
Heide 10  
1780 Wommel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

Vind uw Dräger-  
contactpersoon op:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

