

LE SAVIEZ-VOUS ?




QuickSet

Qu'est-ce que c'est ?

Avec QuickSet, il est possible de modifier un paramètre avec effet immédiat, sans besoin de confirmation. QuickSet permet le réglage en temps réel du paramètre, avec monitoring en temps réel sur l'écran du ventilateur.

Comment l'utiliser ?

1. Sélectionner le paramètre
2. Le bouton devient jaune
3. Appuyer sur la molette pendant 1,5 seconde
4. Le bouton devient vert avec un bord jaune
5. Tourner la molette tout en la maintenant enfoncée
6. Les réglages sont appliqués immédiatement

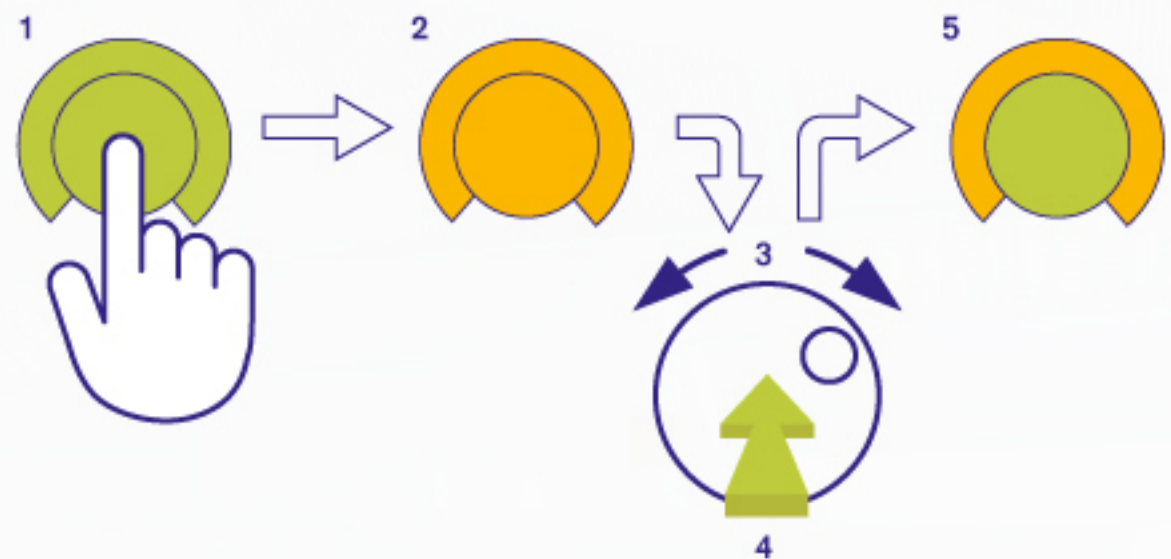

En quoi est-ce utile ?

Pour certaines techniques de recrutement, il est important d'avoir un ajustement continu en temps réel des paramètres, sans perdre de temps à confirmer ou à attendre que le paramètre change.

En quoi la fonction contribue-t-elle à l'amélioration des résultats ?

QuickSet est utile pour réaliser les manœuvres de recrutement en gardant la pression motrice constante. Comme par exemple pour la réalisation de la procédure de PEP incrémentielle comme décrite par Lim et. al¹

