

# ZNÁTE?




## QuickSet

### Co to je?

Pomocí funkce QuickSet je možné upravit parametr a dosáhnout okamžitého účinku, aniž byste potřebovali jakékoli potvrzení. QuickSet umožňuje provádět nastavení parametru v reálném čase s monitorováním na obrazovce ventilátoru v reálném čase.

### Jak se používá?

1. Vyberte parametr
2. Tlačítko poté zežloutne
3. Podržte otočný ovladač stlačený po dobu 1,5 sekundy
4. Tlačítko zezelená a bude mít žlutý okraj
5. Držte ovladač stlačený a zároveň jím otáčejte
6. Zvolené nastavení se okamžitě uplatní

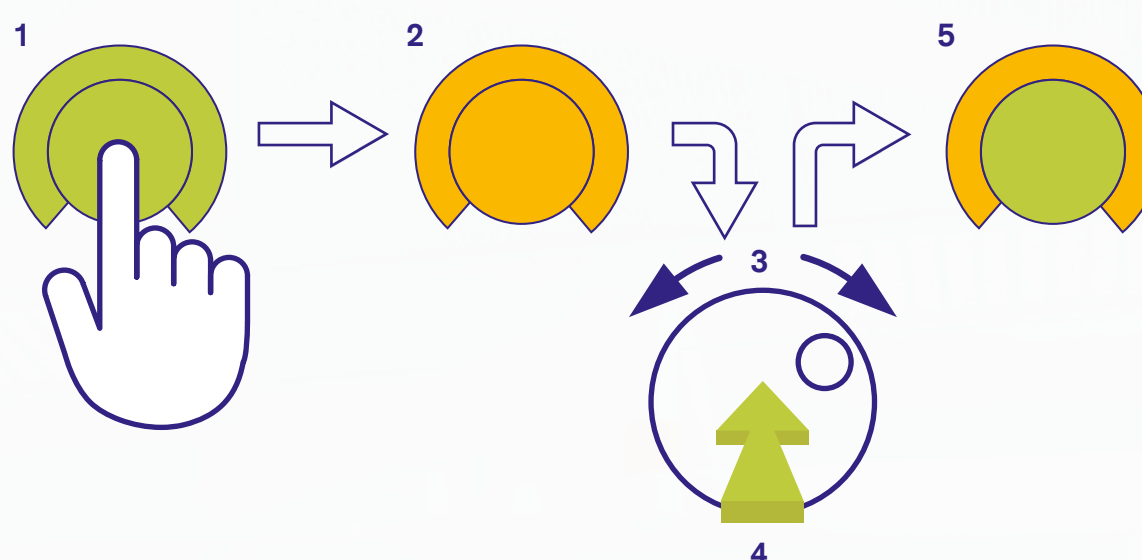


### Proč je to důležité?

V některých technikách recruitment manévru je důležité provádět neustálé úpravy hodnot jednotlivých parametrů v reálném čase, aniž byste ztráceli čas potvrzováním a/nebo čekáním na změnu hodnoty parametru.

### Proč je důležité zlepšovat výsledky?

Funkce QuickSet je užitečná k provádění některých recruitment manévru, tj. podle Lim et al. Přírůstkový PEEP, inspirační tlak zůstávající na stejné úrovni<sup>1</sup>

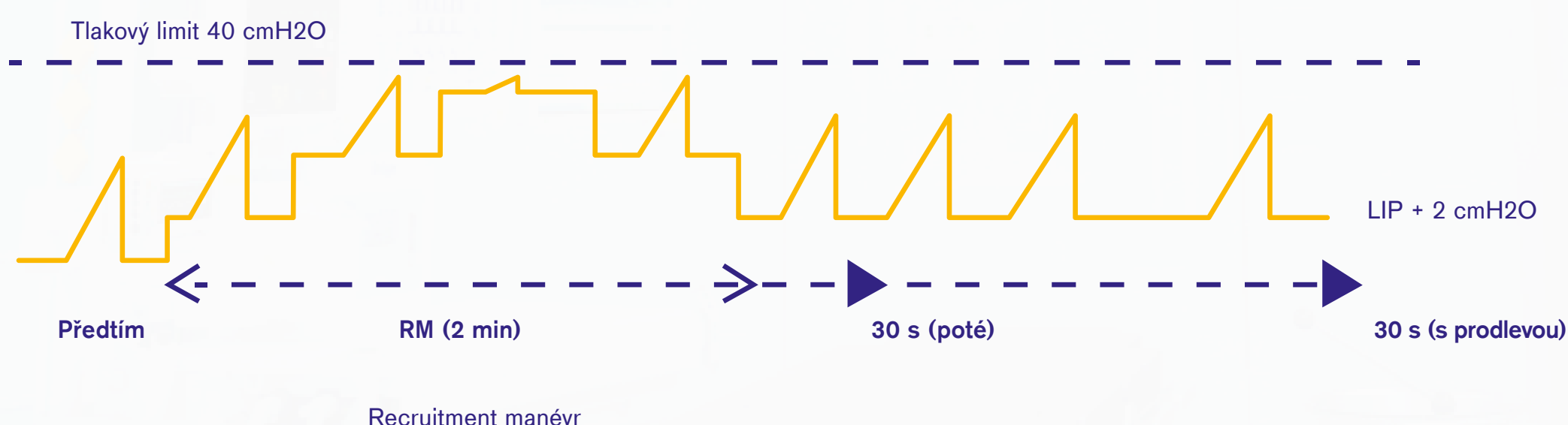

1. Lim et al., Morphometric Effects of the Recruitment Maneuver on Saline-lavaged Canine Lungs: A Computed Tomographic Analysis.