

## Suplemento a las instrucciones de uso de Babylog 8000 plus (90 28 886)

### ADVERTENCIA

Si PEEP está ajustado en  $<2,5$  mbares, se debe utilizar monitorización adicional de la respiración y monitorización de la saturación externa (SpO<sub>2</sub> con límites de alarma estrechos), o monitorización de bradicardia (ritmo cardiaco) o monitorización TcO<sub>2</sub> / TcCO<sub>2</sub> (también con límites de alarma estrechos). Con los ajustes siguientes en el equipo y un PEEP de  $<2,5$  mbares, la desconexión o extubación del paciente o sus consecuencias inmediatas sólo se pueden detectar con seguridad y etiquetar como situación de alarma por estas combinaciones de monitorización, y no por la monitorización integrada de la presión del dispositivo:

- Modo de ventilación con VG y PEEP de  $<2,5$  mbares simultáneamente.
- P<sub>insp</sub>  $<10$  mbares y PEEP de  $<2,5$  mbares simultáneamente.
- Conmutación de un modo de ventilación utilizando VG a IPPV sin desactivar VG y con un PEEP de  $<2,5$  mbares. Por tanto: desactive VG cuando pase a IPPV.

Debido a las tolerancias del equipo y del sistema de tubos, en estos casos no se pueden indicar límites PEEP exactos para omisión de la alarma. Este riesgo aumenta con un PEEP de 2,5 mbares o inferior.

### Ajuste PEEP en $<2,5$ mbares

- Tire del mando para PEEP y gírelo a la izquierda hacia la zona marcada en rojo.
- Ajuste PEEP.

### Dräger Medical GmbH

Moislinger Allee 53 – 55  
D-23542 Lübeck  
Alemania  
+49 451 8 82- 0  
FAX +49 451 8 82- 20 80  
<http://www.draeger.com>

90 38 870 – EB 6173.320 es  
© Dräger Medical GmbH

Edición/Edition: 3 – 2010-09

Sujeto a cambio

