

Tillæg til brugsvejledningen til Fabius MRI

Dette tillæg er til brug sammen med det medicinske udstyr, der er angivet i tabellen.

Medicinsk apparat	Artikelnummer	Udgave
Fabius MRI	9039868	Udgave 1 og senere
Fabius MRI	9054652	Udgave 1 og senere

- Dette tillæg skal opbevares sammen med brugsvejledningen til det medicinske apparat.

BEMÆRK

Overskrifter til kapitler og afsnit i ældre udgaver af brugsvejledningen kan afvige fra dem, der er brugt i dette tillæg.

Tillægget opdaterer oplysningerne i følgende kapitler i brugsvejledningen:

For din og dine patienters sikkerheds skyld

Generel sikkerhedsinformation

ADVARSEL

Risiko på grund af magnetisk tiltrækning

Hvis apparatet flyttes forbi eller placeres tæt på MRI-scannere, kan det blive tiltrukket af scannerens magnetfelt.

- Undlad at flytte apparatet igennem eller sætte det i nærheden af et magnetfelt, der overstiger 40 millitesla (400 gauss). Dette gælder også, når apparatet er slukket.
- Åbn kun ventilatordøren og låsestangen uden for MR-rummet.

Produktlabels

Symbol



Forklaring

Brug kun flasker, der er mærket som MR-sikre.


Ingen typer af desfluranfordampere må bruges i MR-miljøer.

Montering og klargøring

Flytning og placering Fabius MRI

Mærkning af driftsområdet

Følgende bemærkning og tekst er blevet udvidet:

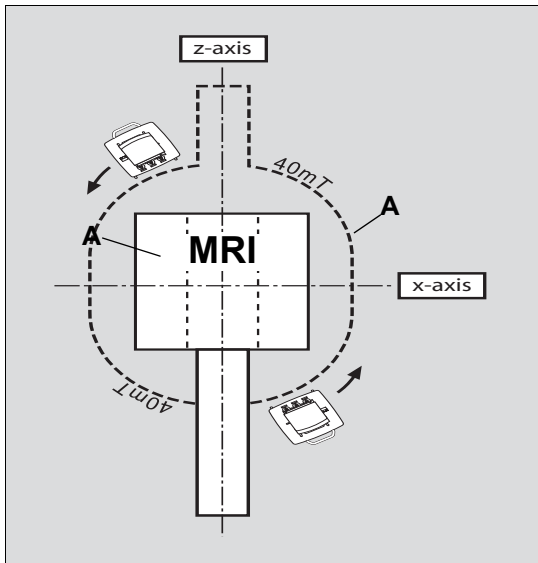

- 1 Bestem det areal i z-x-planet ved hjælp af teslameteret, hvor feltstyrken ikke overstiger 40 mT (400 gauss).


BEMÆRK

Dräger anbefaler afmærkning af 40-milliteslalinjen (A) på gulvet med sort/gul tape.


Placering af apparatet i driftsområdet

Følgende tekst er blevet udvidet:

- 1 Kontroller, om låsestangen (A) på ventilatordøren er placeret korrekt.

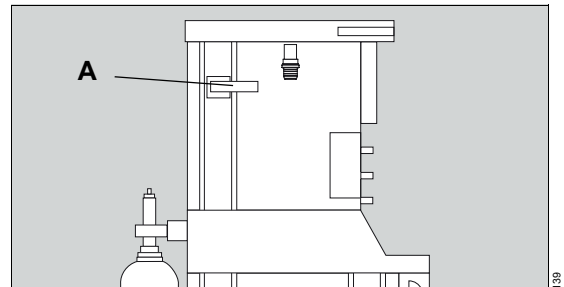


- 2 Tænd apparatet.

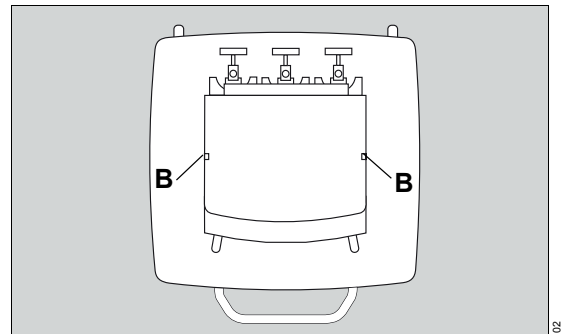


- 3 Flyt Fabius MRI til det afmærkede driftsområde. Sørg for, at apparatet altid er uden for 40-milliteslalinjen. Hvis teslasensorerne (B) i apparatet udsender et akustisk signal, er 40-milliteslagrænsen blevet overskredet.
- 4 Sørg for, at de ekstra alarmLED-bjælker i apparatets øverste hjørner er synlige fra de nødvendige læsevinkler.
- 5 Slut apparatet til strømforsyningen.

 Producent


Dräger Medical GmbH

 Moisinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck

Tyskland

 +49 451 8 82-0

FAX +49 451 8 82-20 80

 <http://www.draeger.com>

9055186 – da

© Dräger Medical GmbH

Udgave/Edition: 1 – 2015-04

Dräger forbeholder sig ret til at ændre udstyret
uden forudgående varsel.



Fra 2015-08:
Dräger Medical GmbH
ændres til
Drägerwerk AG & Co. KGaA