

Arbeitsplatz - Endotracheale Absaugung Verbrauchsmaterial und Zubehör

Organisierte Prozessunterstützung stellt heute im Gesundheitswesen einen wichtigen Beitrag zur Zeit- und Kosteneinsparung dar. Nutzen Sie unsere globale Erfahrung, Ihre Arbeitsprozesse zum Wohl Ihrer Patienten zu optimieren.



Produktvorteile

Optimiertes Absaugen

- Ergonomische Positionierung – alles immer in Reichweite
 - Standardisierter Aufbau – aufeinander abgestimmte Abläufe
 - Klare Trennung – bessere Hygiene
 - Sichere Gerätemontage – kein Stolpern, kein Verschütten
-

Aufbau des Absaugsystems

Etwa 950 mm über dem Fußboden ist eine Konsole mit Seitenschiene montiert, die eine sterile Arbeitsfläche trägt. Der Unterdruckregler ist auf der dem Patienten zugewandten Seite mit gut sichtbarer Anzeige an den Schienen angebracht. Vor dem Regler befindet sich – ebenfalls an den Schienen befestigt – ein Katheterhalter, der einen schnellen Zugriff auf die Katheterspitze gewährt. Innerhalb von Armeslänge können dort auch Drahtkörbe zur Ablage des Katheters und der sterilen Handschuhe angebracht werden.

Die Sekretflaschen sind an einer Standardschiene montiert, die an einem Haltearm unterhalb der Konsole angebracht ist. Während des Absaugens oder wenn die Flaschen geleert werden müssen, können die Sekretflaschen mit dem Schwenkarm nach vorne bis zum Patientenbett gezogen werden. Bei Nichtgebrauch wird der Schwenkarm einfach unter die Arbeitsfläche geklappt. Das schafft wertvollen Freiraum und ermöglicht eine hygienische Trennung vom Patienten. Schwenkarm und Schiene können auch zur Positionierung anderer Zubehörteile dienen, die den gleichen funktionellen Anforderungen unterliegen, z. B. Abfallbeutel und Abfalleimer für scharfkantiges Arbeitsmaterial.

Bestellinformationen

Benötigte Teile	Bestellnummer
Haltearm für Frontschiene	G 96 526
oder	
Haltearm für 38 mm Rohr	G 96 527
Schienenhalterung, kurz	G 13 822
Einzelne Standardschiene, 600 mm	G 13 829
Kleingerätestange, 500 mm	G 15 676
Klemmringsatz	G 19 015
Bronchialabsaugsystem für VarioVac® B/OP-Schiene	MP 00 505
Vakuumschlauch, gemäß Landesstandard	86 01 697
Bronchialabsaugsystem VarioAir® B/OP-Schiene	MP 00535
Schlauch für medizinische Druckluft gemäß Landesstandard	86 01 697
Sekretflaschenpaket	2M 85 056
Deckenhalter	2M 85 119
Absaugschlauchhalter	2M 85 239
Schienenhalter	M 26 842
Zusätzliche Optionen	
Anschlussschlauchhalter	2M 85 446
Drahtkorb für Einweghandschuhe, 200 mm	M 26 146
Drahtkorb für Katheterablage, 480 mm	M 25 121
Abfallbeutelhalter inklusive 100 Beutel	M 24695

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebfeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

