

Atemsystem Dräger Atlan® Familie Demontage / Montage



Voraussetzung: Zubehör (CO₂-Absorber, Filter, Atemschläuche, etc.) entfernen

Konfiguration mit insp. O ₂ -Sensor		Konfiguration mit Patientengasmodul	
<p>1 O₂-Sensor gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.</p> <p>O₂-Sensor in den Sensoranschluss stecken. O₂-Sensor im Uhrzeigersinn drehen.</p> <p>D-16106-2018</p>	<p>2 Rändelmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sensorkappe entfernen.</p> <p>Sensorkappe auf den O₂-Sensor setzen. Rändelmutter ca. 90° im Uhrzeigersinn drehen.</p> <p>D-56682-2018</p>	<p>3 Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn drehen und in den Halter stecken.</p> <p>O₂-Sensoranschluss mit der Verschlusskappe durch drehen im Uhrzeigersinn verschließen.</p> <p>D-56686-2108</p>	<p>4 Die drei hellgrünen Hebel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Atemsystem vertikal nach oben entnehmen.</p> <p>Atemsystem vertikal einsetzen. Die drei hellgrünen Hebel im Uhrzeigersinn drehen.</p> <p>D-56776-2018</p>
<p>5 Kolbenmembran aus Ventilator entfernen.</p> <p>Kolbenmembran einsetzen. Dräger-Inschrift auf dem Boden der Kolbenmembran muss von oben lesbar sein.</p> <p>D-56779-2018</p>	<p>6 CLIC-Adapter abschrauben.</p> <p>CLIC-Adapter anschrauben.</p> <p>D-56885-2018</p>	<p>7 Reinigungsplatte in den Adapter einführen. Adapter schließen, so dass dieser einrastet.</p> <p>Reinigungsplatte aus dem Adapter entfernen. Adapter schließen, so dass dieser einrastet.</p> <p>D-56694-2018</p>	<p>8 In- und Expirationstülle lösen und abziehen. Flowsensoren entfernen.</p> <p>Flowsensoren einsetzen. In- und Expirationstülle einschieben und mit Rändelmutter festdrehen.</p> <p>D-16001-2018</p>
<p>9 Die drei grauen Hebel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Oberteil des Atemsystems abheben.</p> <p>Oberteil des Atemsystems auf das Unterteil setzen und die drei grauen Hebel im Uhrzeigersinn drehen.</p> <p>D-16009-2018</p>	<p>10 APL-Ventil abschrauben.</p> <p>APL-Ventil korrekt ausrichten und mit Rändelmutter festdrehen.</p> <p>D-16078-2018</p>	<p>11 Ventile (gelb und blau) herausnehmen.</p> <p>Ventile korrekt ausrichten. Ventile einsetzen.</p> <p>D-16079-2018</p>	<p>12 Schwarzes Ventil gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.</p> <p>Schwarzes Ventil einsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.</p> <p>D-16085-2018</p>

Aufbereitungsanweisungen*

Tauchdesinfektion	Maschinelle Reinigung und Desinfektion	Sterilisation 134 °C (273,2 °F)	Sichtprüfung
<p>Bitte die in den Gebrauchsanweisungen zu den Dräger-Flowsensoren aufgelisteten Desinfektionsmittel verwenden.</p>	<p>Teile so positionieren, dass alle Innenräume und Oberflächen vollständig gespült werden und das Wasser frei ablaufen kann. Das Bild enthält die O₂-Sensorkappe (unten rechts). Sensorkappe nur bei Konfiguration mit inspiratorischem O₂-Sensor vorhanden.</p>	<p>SpiroLife® Flowsensoren eignen sich nicht für Plasma- oder Strahlensterilisation</p>	<p>Folgende Teile müssen frei von Ablagerungen sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anströmungsgitter - Rückschlagventile (rot und blau) <p>Wenn erforderlich Ablagerungen auf den Ventilplatten der Rückschlagventile mit einem weichen Tuch entfernen. Wenn die Anströmungsgitter beschädigt sind, DrägerService® kontaktieren.</p>

* Stellt keinen Ersatz der Gebrauchsanweisung dar.