

Babytherm® 8004/8010 Cuidados abiertos neonatales

La última generación de sistemas de calentamiento infantil Babytherm® de Dräger establece nuevos niveles en atención abierta al proporcionar a los bebés un entorno térmico único y asegurar un fácil acceso para prestarles la mejor atención posible. Babytherm® es un sistema de calentamiento infantil de cuidados intensivos diseñado como dispositivo terapéutico para proporcionar calor a bebés nacidos a término y prematuros.



Ventajas

Termorregulación adecuada

Babytherm ofrece el entorno termoneutral óptimo que el recién nacido necesita, a salvo del estrés provocado por el frío o el calor. Los calefactores de cerámica y los reflectores dorados reparten el calor de manera uniforme por todo el colchón, de manera que el bebé se sienta cómodo en cualquier lugar. Un colchón de gel conductivo térmico integrado se encarga de mantener la temperatura adecuada en todo momento. Además, puede medir la temperatura central y periférica (dedo del pie) del bebé para saber a tiempo si existe riesgo de que la temperatura sea inestable o el bebé padezca estrés por el frío. Una pantalla digital integrada muestra los valores de medición.

Fácil de usar

Nuestros esfuerzos para proporcionar la mejor ergonomía se ven reflejados en el gran número de funciones prácticas que ofrece el equipo. El panel de control se sitúa justo debajo del calentador radiante, de manera que puede ajustar las funciones de manera fácil. Una pantalla digital de gran tamaño le proporciona información importante desde cualquier posición alrededor de la cuna. Una luz de aviso roja y clara en el extremo del calentador radiante le avisa en caso de alarma incluso si está atendiendo a otro bebé o en otra parte de la sala. Además aparece un mensaje en la pantalla con todos los datos que necesita. La altura del equipo es ajustable y todos los componentes móviles y los controles son fáciles de manejar.

Sinergia del sistema

Babytherm puede funcionar conjuntamente con sistemas arquitectónicos inteligentes, monitorización de cabecera y ventilación neonatal. Este entorno de trabajo integrado es ergonómico e inteligente, simple e intuitivo y perfectamente accesible, lo que mejora la comunicación, ahorra tiempo y ayuda a disminuir la posibilidad de errores tanto en la UCIN como en otras instalaciones.

Accesibilidad inteligente

El smartSWIVEL es un mecanismo que se encarga de que el calor de la lámpara se enfoque siempre en el bebé, incluso si el radiador se mueve hacia un lado para dejar más espacio a los cuidadores. Como resultado, no hay que preocuparse de que el bebé se enfríe o padezca estrés por frío durante radiografías o cualquier otro proceso, ya que la distribución adecuada del calor queda garantizada en todo momento.

Cuidado para el desarrollo

El concepto de cuidados para el desarrollo de Babytherm se materializa en el smartSWIVEL, que permite a la familia estar cerca de su bebé sin poner en peligro su calentamiento. La longitud de los cables de los sensores de temperatura duales facilita la práctica de cuidados canguro. La luz de trabajo incluye ajustes para el día y la noche. Gracias a sus dos niveles de luminosidad, proporciona la iluminación adecuada para cada ocasión. Se puede configurar una luz de alarma central o una alarma que emita un sonido ascendente y grave que suene lejos de la cama.

Accesorios



D-50637-2012

Dräger VarioLux®

Las lámparas de exploración VarioLux® de Dräger ofrecen una luz de exploración de intensidad variable, fría y altamente eficiente y se han diseñado especialmente para su uso en entornos de cuidados intensivos neonatales. Diseñadas para el manejo sencillo con una sola mano, cuentan con configuración de color ajustable y con función de atenuación.



D-7384-2009

Accesorios para cuidados neonatales

Los accesorios de Dräger para la ventilación y la termoterapia neonatales ventilan, reducen el estrés y ayudan a promover el desarrollo del recién nacido de manera cuidadosa y efectiva con una amplia gama de accesorios diseñados específicamente para su uso con los pacientes más pequeños.

Especificaciones técnicas

BABYTHERM	8010	8004
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		
Mecanismo SmartSWIVEL®	•	•
Modo manual	•	•
Modo servo cutáneo	•	•
Luz brillante y suave	•	•
Alarma central	•	•
ThermoMonitoring™	•	•
Mensajes de texto	•	•
Inclinación de la cama	•	•
Paredes laterales internas (7 cm)	•	•
OPCIONES		
Fototerapia integrada	•	•
Ajuste de la altura	•	•
Interfaz RS232	•	•
Cajones de almacenamiento	•	•

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
 Draegerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
 Draegerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
 Draeger Argentina S.A.
 Colectora Panamericana Este
 1717B, 1607BLF San Isidro,
 Buenos Aires
 Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321

BRASIL
 Draeger Indústria e Comércio Ltda.
 Al. Pucurui - 51 - Tamboré
 06460-100 - Barueri - São Paulo
 Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE
 Draeger Chile Ltda.
 Av. Presidente Eduardo
 Frei Montalva 6001-68
 Complejo Empresarial El Cortijo,
 Conchalí, Santiago
 Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA
 Draeger Colombia S.A.
 Oficina: Calle 100 #13-21
 Oficina 503 Bogotá D.C.
 Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA
 Draeger Hispania, S.A.
 C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
 Tel +34 90 011 64 24
 Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO
 Draeger Medical México,
 S.A. de C.V., German Centre
 Av. Santa Fe, 170 5-4-14
 Col. Lomas de Santa Fe
 01210 México D.F.
 Tel +52 55 52 61 43 37
 Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ
 Draeger Perú SAC
 Av. San Borja Sur 573-575
 Lima 41
 Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
 Draeger Portugal, Lda.
 Rua Nossa Senhora da
 Conceição, n.º 3, R/c
 2790-111 Carnaxide
 Tel +351 21 155 45 86
 Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com

Localice a su representante
 de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

