

Dräger Vapor® 2000 y D-Vapor® Vaporizadores para agentes anestésicos

Al igual que el resto de vaporizadores Dräger, las gamas Dräger Vapor 2000 y D-Vapor ofrecen un rendimiento excepcional en lo que respecta a la administración precisa del anestésico, la seguridad, la solidez, la calidad y la durabilidad, lo cual permite mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, la satisfacción del personal y los resultados clínicos.



Ventajas

Funcionalidades de seguridad y facilidad de uso

Las gamas Vapor 2000 y D-Vapor poseen las siguientes características:

- El sistema de montaje Auto Exclusion* evita el uso simultáneo de dos vaporizadores, puesto que, al encender uno de ellos, el otro se bloquea inmediatamente. De esa manera, se incrementa la facilidad de uso y la seguridad de los pacientes;
- la posición «T» del dial de control permite su transporte seguro en posición invertida o inclinada, sin drenar previamente el vaporizador, y evita que se derrame el agente anestésico. Después del transporte, los vaporizadores están listos a funcionar de inmediato conforme a sus respectivas especificaciones;
- en el vaporizador cabe todo el contenido de una botella normal de agente anestésico;
- el D-Vapor cuenta con una alarma acústica de nivel de llenado, para avisar al usuario antes de que el anestésico alcance el nivel crítico;
- los sistemas de llenado específicos para cada agente anestésico eliminan el riesgo de llenar el vaporizador por error con el anestésico incorrecto;
- dispone de varios sistemas de llenado para seleccionar las opciones de llenado específicas para el cliente;
- tapón tipo bayoneta, con codificación por colores, para lograr una apertura fácil y una identificación visual rápida del estado de cierre;
- la botella de anestésico está provista de un adaptador específico para cada anestésico, que evita que el líquido se derrame;
- la batería integrada del D-Vapor electrónico permite un funcionamiento ininterrumpido en caso de corte del suministro eléctrico;
- apto para dispositivos de anestesia de otras marcas provistos de una conexión Selectatec y ISO cónica de 23 mm, respectivamente.

*estándar para las máquinas de anestesia Perseus® A500 y disponible de manera opcional en las gamas Atlan®, Primus® y Fabius®. El sistema de montaje Auto Exclusion es compatible con el conector Dräger Interlock 2 de la estación de anestesia.

Mayor eficiencia en el flujo de trabajo

Las siguientes características de las gamas Vapor 2000 y D-Vapor hacen que resulten muy cómodas para los clínicos:

- una marca azul en la parte de atrás del visor de vidrio permite una mejor legibilidad del nivel de llenado de anestésico;
- han sido concebidos para el uso en un rango de temperatura comprendido entre los 10 °C y los 40 °C (18 °C a 30 °C para el D-Vapor). De este modo, se garantiza una dosificación exacta también en operaciones especiales, en donde el calentamiento o enfriamiento juegan un papel importante: por ejemplo, en la cirugía pediátrica, en la cirugía cardíaca, en caso de quemaduras o en la cirugía ortopédica

Ventajas

Permite un ahorro de costes

El diseño resistente de la gama Vapor 2000 y D-Vapor le proporcionará años de funcionamiento sin problemas y puede ahorrarle costes de mantenimiento, ya que:

- no requieren mantenimiento
- no es necesario recalibrarlos durante su vida útil

Componentes del sistema

D-12E37-2018



Dräger Atlan® A350/A350 XL

Gran flexibilidad mediante una sola plataforma de anestesia con alto nivel de seguridad en cada quirófano. Gracias a su conjunto de funciones clínicas y ventilación de calidad, Atlan es la estación de anestesia ideal para todos los pacientes y procedimientos quirúrgicos. Su diseño ofrece una flexibilidad total para la mayoría de condiciones espaciales. Atlan A350/A350 XL está equipado con un mezclador de gases electrónico con control de gas fresco automático.

D-6833-2011



Perseus® A500

Le permite combinar la excepcional tecnología de ventilación con las últimas tendencias en ergonomía y la integración de sistemas en un concepto pionero en el ámbito de las estaciones de anestesia, desarrollado junto con expertos de todo el mundo para optimizar el flujo de trabajo de anestesia.

Componentes del sistema



D-47657-2012

Fabius® plus XL

Fabius plus XL combina la genuina ingeniería alemana de gran fiabilidad con una terapia de ventilación de alto rendimiento. Gracias a su concepto de diseño escalable, le permite elegir la estación de calidad que desea hoy sin perder de vista sus objetivos y necesidades futuras.



D-19709-2015

SmartPilot® View

SmartPilot® View ofrece tecnología avanzada e innovadora basada en modelos y un concepto de visualización integral de los complejos efectos de los fármacos para mostrar en tiempo real y predictivo los niveles de anestesia. Esta visualización intuitiva proporciona apoyo en todas las fases de la anestesia.

Productos relacionados



D-7420-2011

Dräger Vapor® 3000 y D-Vapor® 3000

Al igual que el resto de vaporizadores Dräger, las series Dräger Vapor 3000 y D-Vapor 3000 ofrecen un desempeño excepcional en lo que respecta a la administración precisa del anestésico, la seguridad, la solidez, la calidad y la durabilidad. En combinación con la estación de anestesia Perseus® A500, contribuyen además a la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo, a los resultados clínicos y en el apoyo en la toma de decisiones.

Especificaciones técnicas

Fabricante	Dräger	Dräger
Modelo	Vapor® 2000	D-Vapor®
Principio	Vaporizador estándar	Vaporizador electrónico
Agente anestésico	Sevoflurano Isoflurano Halotano	Desflurano
Rango de dosificación	0,2 a 8 vol% (sevoflurano) 0,2 a 6 vol% (isoflurano) 0,2 a 6 vol% (halotano)	2 a 18 vol%
Sistema de conexión	Dräger Auto Exclusion Compatible con Selectatec Conector cónico (23 mm) Montaje fijo	Dräger Auto Exclusion Compatible con Selectatec Conector cónico (23 mm) Montaje fijo
Capacidad total de llenado [mL]	360	300
Capacidad total de rellenado [mL]	260	240
Peso vacío [kg]	8	6,4
Temperatura de funcionamiento mínima [°C]	10	18
Temperatura de funcionamiento máxima [°C]	40	30
Caudal [L/min]	0,15 a 15	0,2 a 15
Consumo energético [W]		30 (típico)
Batería de reserva [min]		5
Tiempo de funcionamiento en caso de interrupción del suministro eléctrico		
Posibilidad de transporte	Posibilidad de transporte	Posibilidad de transporte
Compatible con resonancia magnética	sí	no
Garantía	1 año	1 año
Servicio / calibración / mantenimiento	Inspección cada 12 meses Sin recalibración	Inspección cada 12 meses Sin recalibración

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573–575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com