

Supplement

Fabius-familien

ADVARSEL

For at kunne betjene dette medicinske udstyr korrekt skal brugsanvisningen og dette supplement læses og overholdes.

Anæstesiarbejdsplads Software 3.n

Supplement til brugsanvisningen

Apparat	Artikelnummer	Udgave
Fabius Tiro	9054604	Op til 1. Udgave
Fabius MRI	9054652	Op til 1. Udgave

- Opbevar dette supplement sammen med brugsanvisningen til det medicinske udstyr.

Supplementet opdaterer oplysningerne i brugsanvisningen i følgende kapitler:

Konfiguration

Konfiguration i standby

Lækagetest

Følgende tekst er ændret:

Sikkerhedsventiltest

Denne test kontrollerer sikkerhedsventilernes funktionelle integritet.

Testresultaterne vises på skærmen sammen med resultaterne af lækagetesten (B).

Fejlfinding i tilfælde af mislykket sikkerhedsventiltest

Følgende sikkerhedsinformation er ændret:

ADVARSEL

Risiko for uventet overtryk eller undertryk

En snavset eller ikke-fungerende sikkerhedsventil kan ikke kompensere for pludseligt opstået overtryk eller undertryk i ventilationssystemet.

Udfør lækagetest inden opstart af udstyret. Vær opmærksom på testresultaterne for sikkerhedsventilerne.


- Gentag lækagetest. Undlad at betjene udstyret, hvis sikkerhedsventiltesten mislykkes gentagne gange. Kontakt DrägerService eller den autoriserede lokale servicepartner.

Side Standby indst.

Ændring af konfigurationerne


Ændring af enhed for tryk

Følgende tekst er ændret:

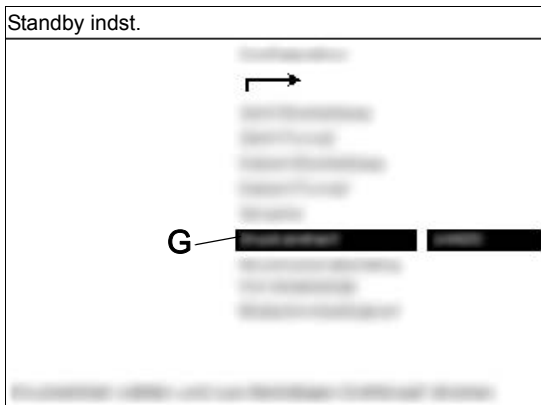

- 1 Vælg menupunktet **Enheder for tryk** (G), og bekræft.

Skærmen med adgangskodeforespørgslen åbner.

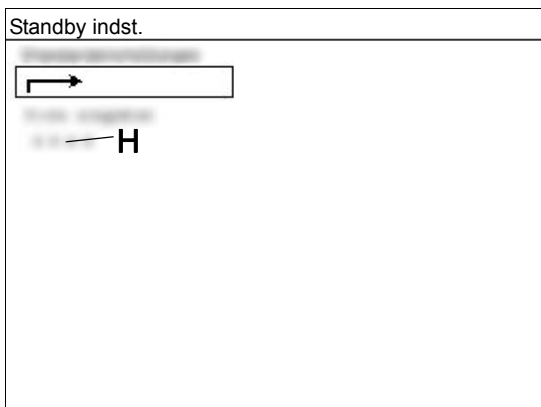

- 2 Indtast adgangskoden (H), og bekræft.

Følgende enheder kan vælges:

- **hPa**
- **cmH₂O**
- **mbar**
- **kPa**

- 3 Vælg ny enhed, og bekræft.

Vinduet lukkes.



Producent



Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53 – 55

D-23542 Lübeck

Tyskland



+49 451 8 82-0

FAX

+49 451 8 82-2080



<http://www.draeger.com>

9056110 – da

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Udgave/Edition: 1 – 2017-07

Dräger forbeholder sig retten til at ændre det
medicinske udstyr uden forudgående varsel.

