


คู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว - HI-Flow Star สำหรับผู้ใหญ่

1a การเชื่อมต่อกับเครื่องผสมอากาศ

1. เชื่อมต่อท่อ O (A) ของชุดเครื่องผสม-กับเครื่องผสม (B) และช่องน้ำ (C)
2. เชื่อมต่อสายหายใจเข้าชนิดขดลวดกับทางเข้าที่สองของช่องน้ำ
3. ดัดข้อต่อสายทำความร้อนและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเข้ากับเครื่องทำความชื้นและชุดท่อ

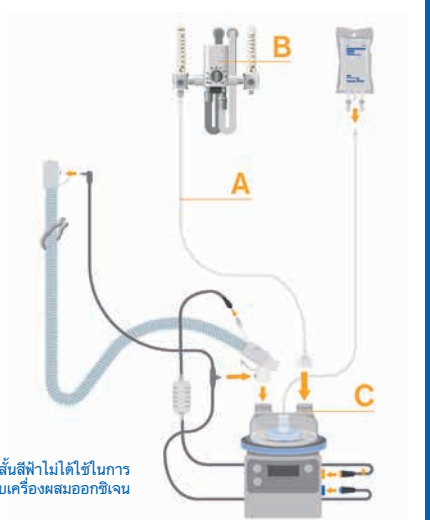


หากมีการใช้เครื่องผสมออกซิเจนกับข้อต่อ 22 มม. (ให้บริการแบบแยกกัน) ให้ใช้สายหายใจเข้าที่ต่อส้นสีฟ้าแทนท่อ O

สายหายใจเข้าที่ต่อส้นสีฟ้าไม่ได้ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องผสมออกซิเจน

1b การเชื่อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจ


1. เชื่อมสายหายใจเข้าที่ต่อส้นสีฟ้า (A) กับช่องหายใจเข้าของเครื่องช่วยหายใจ (B) และกับช่องน้ำ (C)
2. เชื่อมต่อสายหายใจเข้าแบบมีขดลวด กับทางเข้าที่สองของช่องน้ำ
3. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์สายทำความร้อนและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเข้ากับเครื่องทำความชื้นและชุดสาย

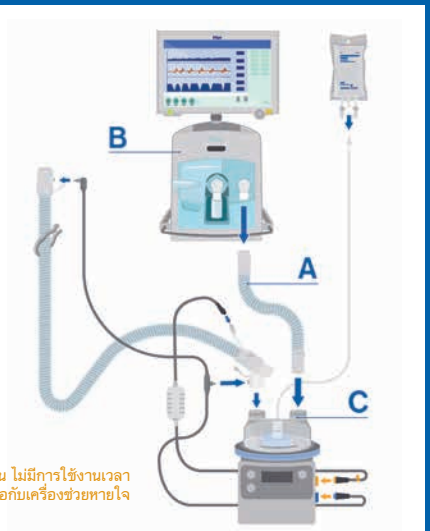

ชุดเครื่องผสมออกซิเจน ไม่มีการใช้งานเวลาที่เชื่อมต่อกับเครื่องช่วยหายใจ

2

1. ใช้ตัววัดขนาดในการจัดขนาดของท่อสายช่วยหายใจที่กำหนด
ตัววัดขนาดแสดงขนาดของท่อ
2. ท่อควรบิดรูดมุกไม่เกิน 50% เท่านั้น
3. เชื่อมต่อสายให้ออกซิเจนทางจมูกกับสายหายใจเข้า
4. เริ่มใช้งานอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์
ตรวจสอบว่ามีกาไหลของอากาศหายใจจากท่อทางจมูก

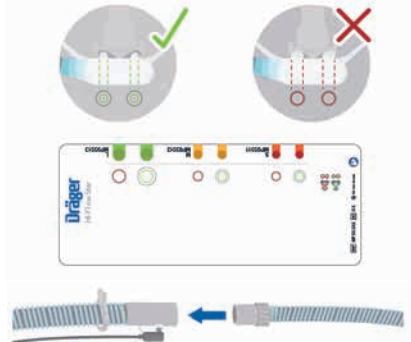

3

1. เพื่อให้กระชับพอดีที่สุด ให้ติดคลิปยึดติดกับเสื้อผ้าหรือชุดเครื่องนอนของผู้ป่วย



4

1. ท่อของสายให้ออกซิเจนทางจมูกอาจเคลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของผู้ป่วย
2. หมุนสายให้ออกซิเจนทางจมูกให้ห่างจากสายให้ออกซิเจนทางจมูกเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับอุปกรณ์
3. ใส่ท่อในจมูกของผู้ป่วยอย่างระมัดระวังและใส่อุปกรณ์สวมศีรษะ
4. สามารถเปลี่ยนขนาดของอุปกรณ์สวมศีรษะได้โดยปรับตีนตุ๊กแก

