


Guia de início rápido – HI-Flow Star para adultos

1a Conexão com misturadores

1. Conecte a mangueira de O₂ (A) do conjunto do misturador ao misturador (B) e à câmara de água (C).
2. Conecte a mangueira inspiratória aquecida à segunda abertura da câmara de água.
3. Anexe os adaptadores do cabo de aquecimento e os sensores de temperatura ao umidificador e ao sistema de mangueiras.

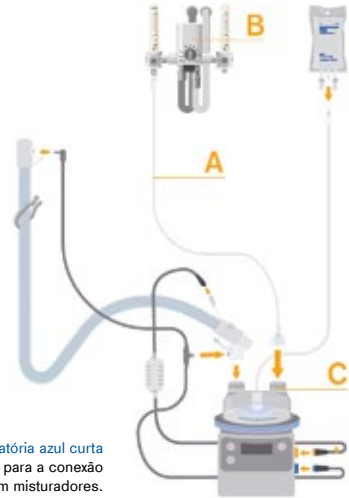


Se o misturador estiver sendo usado com um adaptador de 22 mm (disponível separadamente), a mangueira inspiratória azul curta é usada no lugar da mangueira de O₂.

A mangueira inspiratória azul curta não é usada para a conexão com misturadores.

1b Conexão com ventiladores


1. Conecte a mangueira inspiratória azul curta (A) à porta inspiratória do ventilador (B) e à câmara de água (C).
2. Conecte a mangueira inspiratória aquecida à segunda abertura da câmara de água.
3. Conecte os adaptadores do cabo de aquecimento e os sensores de temperatura ao umidificador e ao sistema de mangueiras.

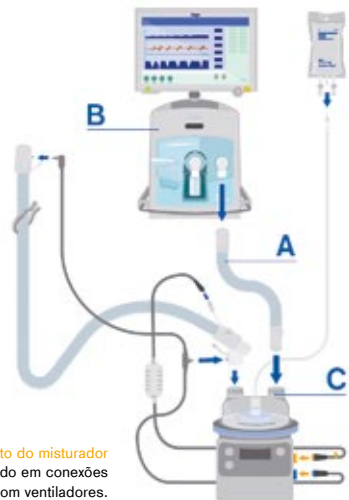

O conjunto do misturador não é usado em conexões com ventiladores.

2

1. Use a escala de tamanhos para determinar o tamanho necessário da pronga. A escala de tamanhos mostra os tamanhos de pronga disponíveis.
2. A pronga deve fechar as narinas até no máximo 50 %.
3. Conecte a cânula nasal à mangueira inspiratória.
4. Inicie o equipamento conforme as instruções de uso e determine os parâmetros. Confira se há fluxo respiratório saindo da pronga.

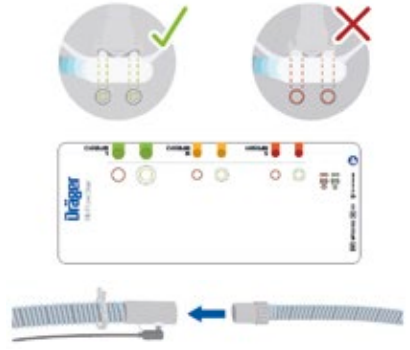

3

1. Para ter o melhor ajuste possível, anexe o clipe de leito à roupa do paciente ou à roupa de cama.



4

1. A mangueira da cânula nasal pode ser posicionada à direita ou à esquerda do paciente.
2. Vire a cânula nasal de modo que a mangueira da cânula nasal seja posicionada na direção do equipamento.
3. Coloque a pronga com cuidado no nariz do paciente e passe o ajuste de cabeça.
4. O tamanho do ajuste de cabeça pode ser alterado usando as tiras aderentes.

