

## Nebulizador de medicamentos Inhalette

El nebulizador Inhalette tiene funciones específicas en lo que a la aerosolterapia se refiere.



## Ventajas

---

### Inhalette

La familia de nebulizadores Inhalette tiene funciones específicas en lo que a la aerosolterapia se refiere. El nebulizador puede operar tanto con oxígeno como con aire comprimido. El aerosol se aplica con una máscara o boquilla.

---

### Inhalette S

El Inhalette S con interruptor de conmutación se utiliza para aplicaciones sencillas. Esta unidad produce un espectro de aerosol fijo de 3,7  $\mu\text{m}$  que actúa principalmente en bronquiolos y alveolos.

---

### Nebulizador Inhalette “Vario”

El nebulizador Inhalette “Vario” es un dispositivo versátil. Para establecer el rango de gota óptimo, el nebulizador puede conectarse mediante un adaptador a un flujómetro de oxígeno o aire comprimido. El tamaño de la gota se regula mediante el flujo.

Flujo bajo = gotas más grandes; flujo alto = gotas más pequeñas.

---

### De un vistazo

- Aerosol farmacéutico ideal para la adecuada terapia requerida
- Interruptor de conmutación de encendido/apagado
- Uso con  $\text{O}_2$  o aire comprimido
- Soporte del nebulizador de medicamentos
- Esterilización a temperaturas de hasta 134 °C
- Filtro de la entrada de gas (válvula de flujómetro/interruptor de conmutación)

## Detalles



D-10086-2009

Inhalette S



D-7099-2016

Nebulizador Inhalette "Vario"



D-7098-2016

Sistema de riel del nebulizador Inhalette "Vario"

## Especificaciones técnicas

Gas impulsor	O <sub>2</sub> / aire comprimido
Diámetro de partícula (MMAD)	3,7 µm con válvula de conmutación o ajustable entre 2,5 y 7 µm mediante la regulación del flujo
El nebulizador, la máscara y la boquilla pueden esterilizarse hasta 134 °C	

## Información para pedidos

Inhalette S (válvula de conmutación, nebulizador, máscara, tubo de conexión de 3 m)	2M85674
Nebulizador (incluida boquilla)	2M85571
Máscara	M11015
Boquilla (repuesto)	M12394
Adaptador para flujómetro de O <sub>2</sub> (M34x1.5)	MP01184
Adaptador para flujómetro de aire (M32x1.5)	MP01185
Tubo de conexión del flujómetro/nebulizador, espiral	MP03322
Tubo de conexión del flujómetro/nebulizador, recto, 3 m	M17717
todos los flujómetros o DigiFlow de 16 l/min o 32 l/min: consulte el catálogo de flujómetros	
Inhalette Vario puede configurarse individualmente con los siguientes componentes:	
Nebulizador (incluida boquilla); Adaptador; Tubo de conexión y flujómetro o DigiFlow	

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania

### SEDE REGIONAL

**PANAMÁ**  
Draeger Panamá S. de R.L.  
Business Park, Torre V, piso 10  
Av. De la Rotonda  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### VENTAS INTERNACIONALES

**PANAMÁ**  
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.,  
Calle 57B, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30 y 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

### COLOMBIA

Carrera 11a # 98 – 50  
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

### ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.  
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 358 36 19  
[clientesdraegermedical@draeger.com](mailto:clientesdraegermedical@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 43 37  
Fax +52 55 52 61 41 32

### PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 57B, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30 y 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

### PERÚ

Draeger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6–6A  
2790-072 Carnaxide  
Tel +351 21 155 45 86  
Fax +351 21 155 45 87  
[clientesportugal@draeger.com](mailto:clientesportugal@draeger.com)

Localice a su representante de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

