

Präzise und intelligente Flowmessungen Verbrauchsmaterial und Zubehör

Der richtige Flowsensor ist entscheidend. Flowsensoren sind kein unbedeutendes Zubehör. Die richtige Auswahl macht den entscheidenden Unterschied in der Leistungsfähigkeit Ihres Ventilators und der Präzision wichtiger Messwerte aus.



Produktvorteile

Präzise und intelligente Flowmessungen

Sie haben sich für Anästhesie- oder Intensivbeatmungsgeräte von Dräger entschieden und damit einen der weltweit führenden Anbieter auf diesem Gebiet gewählt. Sollten nicht die gleichen Qualitäts- und Leistungsmaßstäbe auch für Ihre Flowsensoren gelten?

Das Original-Zubehör von Dräger erfüllt die gleichen hohen Ansprüche an Leistung und Sicherheit, die Sie auch an Ihre Geräte stellen. Seit Jahrzehnten entwickelt und produziert Dräger Flowsensoren. Unsere umfangreiche Sensoren-Familie – Spirolog, Neonatalsensoren und der SpiroLife – spiegelt diese Erfahrung und Kompetenz wider. Alle hier genannten Sensoren beruhen auf dem bewährten Hitzdraht-Anemometrie Verfahren. Aufgrund extrem schneller und genauer Messergebnisse, sowie ausgesprochen niedriger in- und expiratorischer Widerstände ist es anderen Verfahren deutlich überlegen. Sie benötigen nur einen oder zwei dieser qualitativ hochwertigen Sensoren für die Anwendung an fast allen Geräten in Ihrem spezifischen Bereich.

Die Neuentwicklung auf dem Gebiet der Flowsensoren stellt der Infinity ID Flowsensor dar. Er beinhaltet die RFID* Technologie und bietet dadurch den Zusatznutzen der Kompatibilitätskontrolle.

Mit Hilfe dieser Funktion des Infinity ID Flowsensors wird überprüft, dass er kompatibel mit dem aktuell verwendeten Gerät ist.

Der Infinity ID Flowsensor ist kompatibel zu nahezu allen Dräger Beatmungs- und Anästhesiegeräten. Die Eigenschaft der Kompatibilitätskontrolle läßt sich mit den Geräten aktivieren, in denen ein RFID-Modul integriert ist.

Für welchen Dräger Flowsensor Sie sich auch entscheiden – Sie können sicher sein, die richtige Wahl getroffen zu haben.

* RFID: Radio Frequency Identification

SpiroLife – die perfekte Ergänzung ...

Wenn Sie wiederverwendbares Zubehör bevorzugen, dann ist SpiroLife der richtige Sensor für Sie. Dieser einzigartige Sensor, als Bestandteil der Dräger Sensoren-Familie, ist der erste sterilisierbare Flowsensor mit Hitzdraht-Technologie. Dadurch fügt er sich nahtlos in Ihren gesamten Sterilisationsprozess ein. Durch diese Prozessoptimierung minimieren Sie nicht nur Hygienerisiken, Sie sparen auch noch Zeit und Geld. Und das Beste: SpiroLife ist vollständig kompatibel zu allen Dräger Geräten, in denen Sie heute den Spirolog Sensor einsetzen.

Bestellinformationen

| | Infinity® ID Flowsensor | Spirolog® | SpiroLife® | Neonatal Y-Stück Flowsensor | Neonatal ISO 15 Flowsensor | Neonatal Flowsensor- Einsatz |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 68 71 980 (5er Set) | 84 03 735 (5er Set) | MK01900 | 84 10 185 | 84 11 130 | 84 10 179 (5er Set) |
| Material | Küvette: Polycarbonat (PC) Sensoreinsatz: Acrylnitril- Butadien- Styrol (ABS) | Küvette: Polycarbonat (PC) Sensoreinsatz: Acrylnitril- Butadien- Styrol (ABS) | Polyphenylsulfon (PPSU) | Polysulfon (PSU) | Polysulfon (PSU) | Polysulfon (PSU) |
| Lebensdauer | Solange einsetzbar, wie ein Abgleich erfolgreich möglich ist | Solange einsetzbar, wie ein Abgleich erfolgreich möglich ist | Solange einsetzbar, wie ein Abgleich erfolgreich möglich ist | Solange einsetzbar, wie ein Abgleich erfolgreich möglich ist | Solange einsetzbar, wie ein Abgleich erfolgreich möglich ist | Solange einsetzbar, wie ein Abgleich erfolgreich möglich ist |
| Messverfahren | Hitzdraht- Anemometrie | Hitzdraht- Anemometrie | Hitzdraht- Anemometrie | Hitzdraht- Anemometrie (integrierter Sensor-Einsatz) | Hitzdraht- Anemometrie (integrierter Sensor-Einsatz) | Hitzdraht- Anemometrie |
| Desinfizierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sterilisierbar (Dampfsterilisation) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompatibilität (nicht alle Geräte sind weltweit verfügbar) | Geräte mit RFID- Modul (z.B. Evita Infinity® V500 und V300, Perseus® A500 und Primus Infinity® Empowered) und Geräte ohne aktive RFID- Funktionalität: Evita Familie, Savina Familie, Primus/Apollo, Fabius Familie, Julian, Cato, Cicero | Primus /Apollo, Fabius Familie, Evita Familie, Savina Familie, Julian, Cato, Cicero | Zeus, Primus/ Apollo, Perseus® A500, Fabius Familie, Evita Familie, Savina Familie, Julian, Cato, Cicero | Babylog 8000 plus, Babylog VN500, Evita NeoFlow | Babylog 8000 plus, Babylog VN500, Evita NeoFlow | Einsatz für Neonatal Flowsensor ISO 15 und Neonatal Y-Stück Flowsensor |

Infinity® ID Flowsensor, SpiroLife® und Spirolog® sind eingetragene Warenzeichen von Dräger.

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

