

## Option Advanced Data Analysis Package (ADAP)

Dräger PulmoVista® 500 : l'option Advanced Data Analysis Package (ADAP) a été conçue pour ceux qui souhaitent utiliser PulmoVista® 500 dans le cadre de travaux cliniques et de recherches avancés.



### ADAP ÉTEND LES FONCTIONNALITÉS DE PULMOVISTA 500 AUX FONCTIONS SUIVANTES :

#### – Saisie des données patient

Pour la saisie de toutes les informations concernant le patient. Le nom du patient s'affiche dans la barre d'en-tête de PulmoVista 500. Si elle a été saisie, l'ID patient, accompagnée d'un bref commentaire, est intégrée aux noms du sous-dossier et des fichiers contenant les données EIT, facilitant ainsi la manipulation des fichiers de données EIT.

#### – Enregistrement des données

Pour l'enregistrement des données EIT sur PulmoVista 500. Les données peuvent être enregistrées sous la forme de fichiers simples ou continus. La longueur d'un fichier peut être réglée pour une durée de 30 secondes à 10 minutes.

#### – Repérage d'événements

L'utilisateur peut utiliser cette fonction pour repérer et annoter des événements pendant l'enregistrement des données.

#### – Revue des données

Pour revoir des fichiers de données EIT déjà enregistrés sur PulmoVista 500. Des commandes du type de celles de

Media Player permettent à l'utilisateur de naviguer facilement à travers les fichiers de données enregistrés.

#### – Gestion des fichiers

Les fichiers de données enregistrés peuvent être copiés sur une clé USB ou être effacés.

#### – Augmentation du taux de trame

Augmentation de la résolution temporelle des mesures EIT. Avec ADAP, les taux de trame peuvent être réglés sur 40 ou 50 Hz (images dynamiques par seconde).

#### – Filtre passe-bande

Utilisé pour afficher des variations de l'EIT se produisant à l'intérieur d'une plage de fréquences particulière – par exemple, l'affichage de l'activité cardiaque peut être optimisé en réglant le passe-bas sur 10 de moins que le rythme cardiaque et le passe-haut sur 10 de plus que le rythme cardiaque.

#### – Réglage manuel de la fréquence de fonctionnement

PulmoVista 500 détermine automatiquement la fréquence de fonctionnement optimale. Cependant, cette fonction permet à l'utilisateur de maintenir la fréquence de fonctionnement constante, ce qui peut être requis dans le cadre de recherches.



PulmoVista® 500

#### SIÈGE

Draegerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

#### Fabricant :

Draegerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

#### BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.  
Heide 10  
1780 Wommel  
Tel +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 462 52 40  
[mtbe.info@draeger.com](mailto:mtbe.info@draeger.com)

#### CANADA

Draeger Medical Canada Inc.  
2425 Skymark Avenue, Unit 1  
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6  
Tel +1 905 212 6600  
Toll-free +1 866 343 2273  
Fax +1 905 212 6601  
[Canada.support@draeger.com](mailto:Canada.support@draeger.com)

#### FRANCE

Dräger Médical S.A.S.  
Parc de Haute Technologie  
d'Antony 2  
25, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tel +33 1 46 11 56 00  
Fax +33 1 40 96 97 20  
[dlmfr-contact@draeger.com](mailto:dlmfr-contact@draeger.com)

#### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Branch Office, P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tel +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

#### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)



Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIa  
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH  
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des  
instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit. Date de réalisation : juin 2015