




GUÍA DE INICIO RÁPIDO – Sistema Seattle PAP plus – CPAP de burbuja

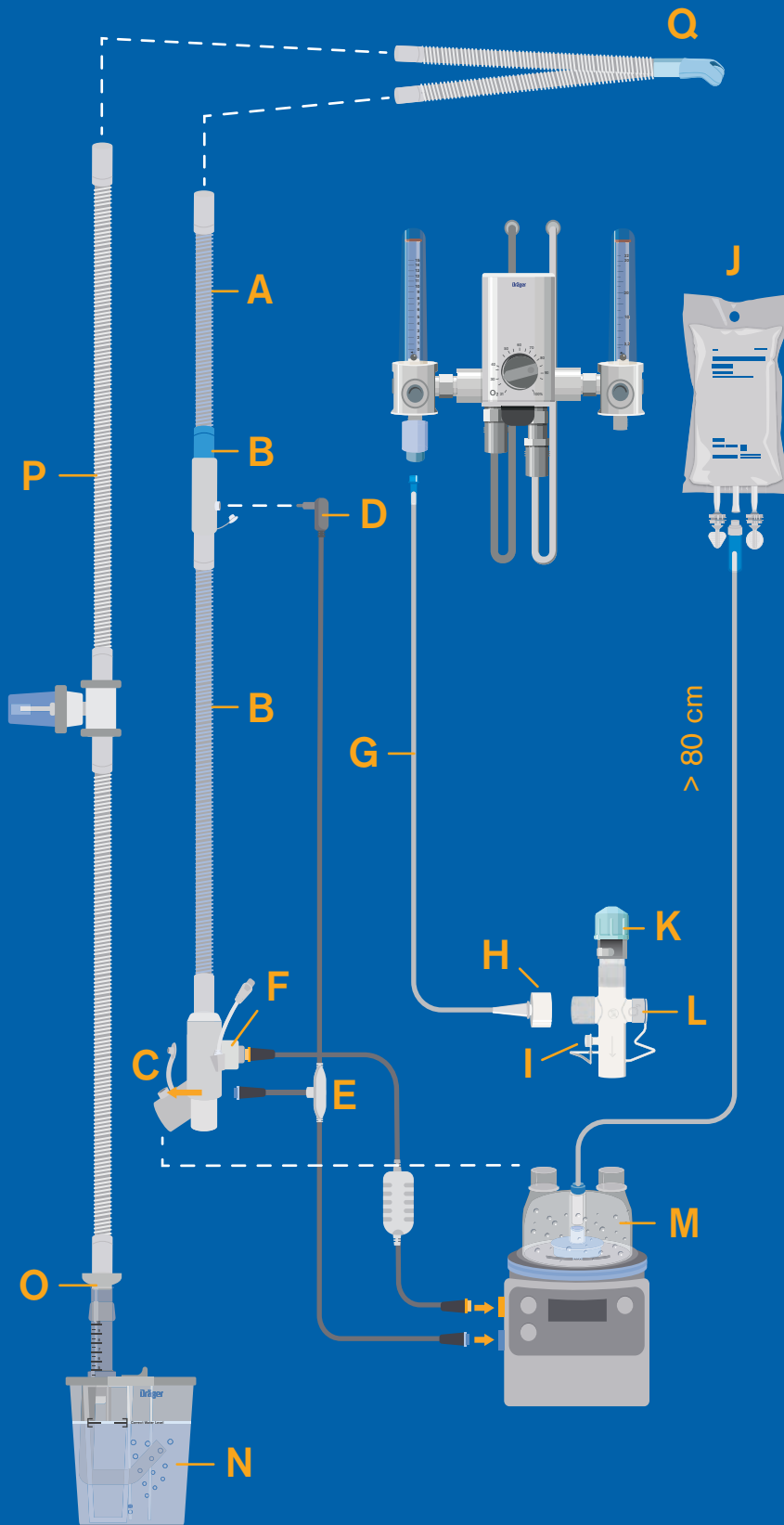

- A** Tubo de extensión
- B** Tubo inspiratorio calefactado (azul)
- C** Conector para tubo inspiratorio
- D** Sensor de temperatura en el lado del paciente
- E** Sensor de temperatura en el lado del humidificador
- F** Conector para calentador de tubo inspiratorio
- G** Tubo de O₂
- H** Conector para acoplar el tubo de O₂ al mezclador
- I** Puerto de conexión para una línea de medición de presión
- J** Puerto para bolsa de agua
- K** Conector con válvula de alivio de presión premontada (Presión de apertura a 8 l/min 17+3 mbar)
- L** Conector para un dispositivo de medición de oxígeno
- M** Cámara humidificadora
- N** Cámara de CPAP de burbuja
- O** Embudo de llenado y conector giratorios para tubo espiratorio
- P** Tubo espiratorio con trampa de agua
- Q** BabyFlow plus

Inserte la cámara humidificadora en el humidificador MR850 de Fisher & Paykel y retire los tapones. Perfore la bolsa de agua con agua destilada y abra los orificios del tubo de suministro de agua. Asegúrese de que la cámara humidificadora se llena de agua.


Use el embudo para llenar el reservorio de agua con un máx. de 0,9 l de agua destilada. Para ajustar el nivel de agua, use una jeringa para añadir o eliminar agua destilada hasta que se alcance la línea de nivel de agua correcta.

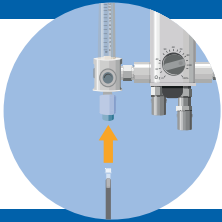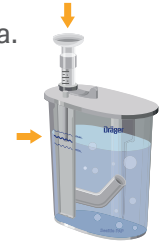

Conecte el tubo de O₂ al mezclador.

Conecte el adaptador del tubo de O₂ (H) a la apertura lateral del conector con la válvula de alivio de presión (límite fijo de 17 cm H₂O).



La apertura lateral (L) del conector puede usarse para la medición de oxígeno si fuese necesario. La apertura (I) se puede usar para la medición de la presión externa.

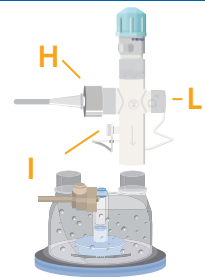

Conecte el tubo inspiratorio calefactado (B) a la cámara humidificadora. Conecte los dos sensores de temperatura (D, E) al tubo inspiratorio (B).

Establezca el flujo y la concentración de oxígeno en los valores requeridos.

Límites de flujo permitidos: de 4 a 12 l/min. Flujo recomendado: 8 l/min.

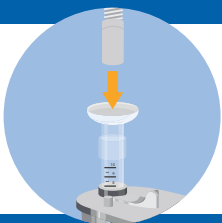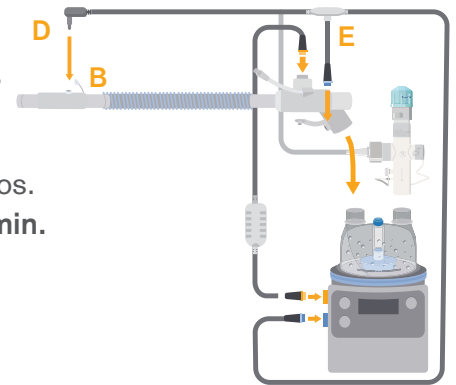

Conecte el tubo espiratorio del circuito respiratorio al embudo de llenado.

Establezca el valor de CPAP de la cámara de burbujas CPAP y fíjela en su posición con el cierre de seguridad del tubo.

Conecte el BabyFlow plus directamente a los tubos respiratorios.



Lleve a cabo una prueba de fugas cerrando el adaptador BabyFlow para gafas nasales o mascarillas neonatales con el pulgar. Fije el valor de CPAP en **10 cm/H₂O** y el flujo en **1 l/min**.

Deben aparecer burbujas en el dispositivo CPAP. **Empiece la terapia de CPAP.**