

Colchón de calor TransWarmer®

Calor vital para los pacientes más pequeños. En cualquier entorno y en cualquier lugar.



El colchón de calor TransWarmer es un producto esencial cuando se trata de proteger a los recién nacidos frente al peligroso estrés por frío. Ya sea durante los primeros auxilios, el transporte interhospitalario o en una ambulancia, durante esta fase los delicados pacientes están expuestos constantemente al riesgo de padecer hipotermia. Para evitarlo e impedir el estrés que inhibe el desarrollo, el colchón de calor TransWarmer ofrece a los pacientes más pequeños en fase crítica hasta dos horas de calor adicional.

SENCILLO Y FIABLE

El uso del colchón de calor TransWarmer es tan flexible como sencillo: con sólo doblar con firmeza y brevemente la placa incorporada se activa el colchón. Si se ha activado el mecanismo, el WarmGel patentado alcanza en sólo unos 90 segundos una temperatura de aprox. 38 °C. Este colchón de calor latente probado y seguro se distingue porque suministra calor de forma constante sin necesidad de una fuente de alimentación externa, lo cual garantiza un elevado grado de independencia y flexibilidad en todas las situaciones.

CÓMODO

Además de las propiedades térmicas especiales, la superficie suave y deformable del WarmGel permite en todo momento una colocación cómoda del recién nacido. Asimismo, el colchón de calor TransWarmer sirve para absorber las vibraciones y disminuye el riesgo de derrames cerebrales. De esta forma, el personal sanitario puede centrarse por completo en las necesidades del paciente y en los retos que plantea el transporte.

SEGURO

La seguridad del paciente tiene siempre la principal prioridad. El gel no tóxico no daña la piel ni los ojos de los bebés ni siquiera por contacto directo. El uso en un solo paciente reduce el riesgo de infección cruzada causada por el colchón de calor TransWarmer. El TransWarmer es transparente a los rayos x y compatible con MRI.

Advertencia: no utilizar junto con dispositivos de terapia de calor. Existe riesgo de hipertermia.



MT-3302-2005

Colchón de calor TransWarmer®

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	25 x 41 cm
Contenido	Acetato sódico, agua y espesantes (ninguno de los contenidos es tóxico)
Temperatura en funcionamiento	38 °C a una temperatura ambiente de 22 °C
Alcanza la temperatura de funcionamiento	en 90 segundos a una temperatura ambiente de entre 18 y 28 °C

Para uso en sala de recién nacidos, UCI neonatal, quirófano y urgencias.
(No usar en combinación con dispositivos de terapia de calor.)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Colchón de calor TransWarmer (caja de 6 colchones de un solo uso)	MP01414
---	---------

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

FABRICANTE:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

**SEDE REGIONAL****PANAMÁ**

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES**PANAMÁ**

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100 / Fax -9130

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 48 36 8300
Fax +54 11 48 36 8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 6401
Fax +55 11 41 93 2070

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial
El Cortijo, Conchalí,
Santiago, Chile
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 - Perú
Tel +511 626 95-95 / Fax -73