


VacuSmart® Verbrauchsmaterial und Zubehör

Einen Schritt voraus bei der Sekretabsaugung. In der klinischen Umgebung sind zeiteffiziente Lösungen gefragt, die einfach zu bedienen sind. Diesen Anforderungen wird VacuSmart® als Einweglösung für Bronchialabsaugungen gerecht. VacuSmart® ist ohne Umrüstung mit allen Dräger Bronchusabsaugungen mit 700-ml Behältern kompatibel.

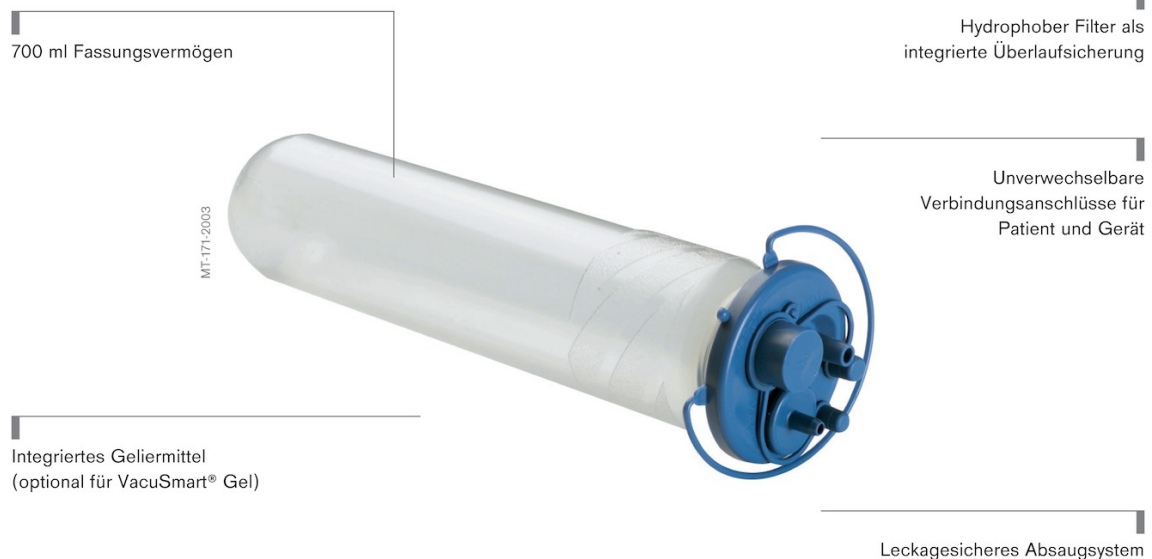

Produktvorteile

VacuSmart

Drei weitere Vorteile, die den Klinikalltag vereinfachen:

- Die VacuSmart-Einweglösung gibt Sicherheit in der Hygiene
- VacuSmart ist einfach in der Handhabung
- Die neue integrierte Überlaufsicherung schützt zuverlässig vor Kontamination

Die VacuSmart-Einweglösung ist hygienisch – Sicherheit geht vor

Der VacuSmart wurde für die vorhandenen Dräger Bronchusabsaugegeräte optimiert und ausgiebig getestet. Das geschlossene, lecksichere System (auch durch das integrierte Geliermittel beim VacuSmart Gel) reduziert sich Infektionsrisiko auf ein Minimum. All diese Vorteile verbinden sich im Vacu Smart zur optimalen Lösung für Sicherheit, Hygiene und einfaches Handling – im modernen, ergonomischen Design.

Vacuumart ist einfach in der Handhabung – Zeit ist Geld

Wo jede Sekunde zählt, ist Zeit der kostbarste Faktor. Dies gilt besonders für all die Situationen, in denen eine Bronchialabsaugung zum Einsatz kommt. Deshalb ist der VacuSmart besonders benutzerfreundlich entwickelt worden: keine Umrüstung bei der Dräger Bronchusabsaugung und keine Zeitverschwendung, wenn es um Aufbau oder Entsorgung geht. Das Geliermittel ist beim VacuSmart Gel integriert und durch einen wasserlöslichen Beutel geschützt. Durch die Gelierung wird eine Entsorgung im Hausmüll möglich. Die Anschlüsse für Absaugeschlauch und Vakuumschlauch sind eindeutig zu zuordnen – ein falsches Anschließen ist damit praktisch ausgeschlossen. Auch das Entnehmen des VacuSmart vom Sekretgefäß ist dank seines Schnellauslösemechanismus mit einem Handgriff erledigt. Zudem sorgt dieser Mechanismus, zusammen mit den leicht und sicher schließenden Verschlüssen, für eine Vereinfachung beim Transport und bei der Entsorgung.

Die neue integrierte Überlaufsicherung – Zuverlässiger Schutz

Ein neuer, hydrophober Filter dient als Überlaufsicherung, indem er zuverlässig vor Übersaugung schützt, sobald das maximale Füllvolumen erreicht ist. Zusätzlich werden Sekretaerosole und begleitende Bakterien herausgefiltert. Zusammen bieten diese Funktionen einen zuverlässigen Schutz vor Kontamination der Umwelt.

Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen bieten wir Ihnen die Möglichkeit eines der attraktiven VacuSmart-Sets zu wählen:

Technische Daten

Füllvolumen	700 ml
Geliermittel	Natriumpolyacrylat
Überlaufsicherung	Integriert, hydrophober Filter
Empfohlene Standzeit	24 Std.
Material	PE Polyethylen, EVA

Bestellinformationen

VacuSmart® Sets	Bestellnr.
All-in Disp. System Solution Einweg-Absaugeset besteht aus je 25 Stk. VacuSmart® 700 ml MX23023 und VacuSmart® Tube MX23026	MP00061
Set VacuSmart® Gel und Tube Einweg-Absaugeset besteht aus je 25 Stk. VacuSmart® Gel MX23025 und VacuSmart® Tube MX23026	MP03211
VacuSmart®, 700 ml Verpackungseinheit 25 Stück	MX23023
VacuSmart® Gel, 700 ml Verpackungseinheit 25 Stück	MX23025
VacuSmart® Tube, 2 m Verpackungseinheit 25 Stück	MX23026

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldegstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

