

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


WaterLock® 2 / Infinity ID WaterLock® 2

Conexión de la trampa de agua


1. Extraiga la nueva trampa de agua del embalaje.
2. Escriba la fecha actual en la parte frontal de la trampa de agua.

NOTA

El segundo paso no es necesario si la trampa de agua Infinity ID WaterLock 2 se usa junto con dispositivos Dräger con tecnología Infinity ID, pues el periodo máximo de uso de la trampa de agua se monitoriza automáticamente.

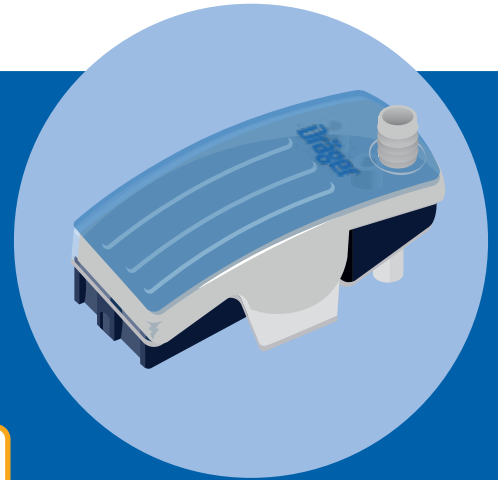

3. Sujete la trampa de agua **(A)** por las superficies estriadas e introdúzcala en el soporte o adaptador hasta que encaje de manera audible.
4. Conecte la línea de muestra **(B)** a la conexión Luer Lock de la trampa de agua.

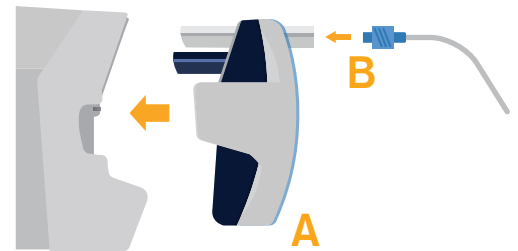

Sustitución de la trampa de agua


- Cuando se haya alcanzado el periodo de uso máximo de 4 semanas.
- Si se muestra un mensaje de error en el monitor de paciente o en la estación de anestesia.
- Si el vaciado no rectifica el mensaje de error del monitor de paciente o de la estación de anestesia.
- Si está demasiado sucia.
- Si los elementos de sellado en las conexiones se ponen de color azul.

Para conectar la nueva trampa de agua, siga las instrucciones de la sección “Conexión de la trampa de agua” que aparece arriba.


	Referencia
WaterLock® 2, 12 uds.	6872130
Infinity ID WaterLock® 2, 12 uds.	6872020
Línea de muestra, desechable, 10 uds.	8290286

Vaciado de la trampa de agua

1. Extraiga la línea de muestra de la trampa de agua.
2. Presione las superficies estriadas de la trampa de agua y tire hacia afuera.
3. Introduzca una jeringuilla vacía (C) con un volumen de llenado de al menos 20 ml sin cánula en el conector azul.

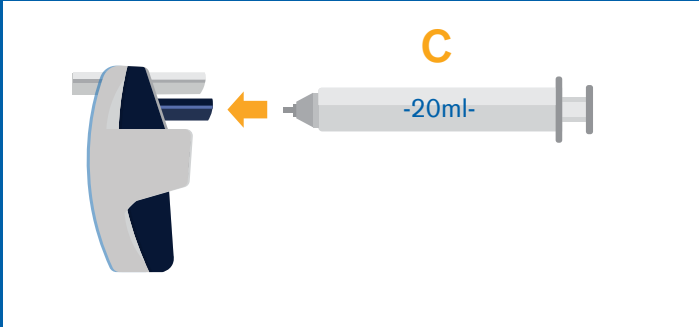

4. Extraiga el agua, retire la jeringuilla y elimine la jeringuilla llena como desecho infeccioso del hospital.

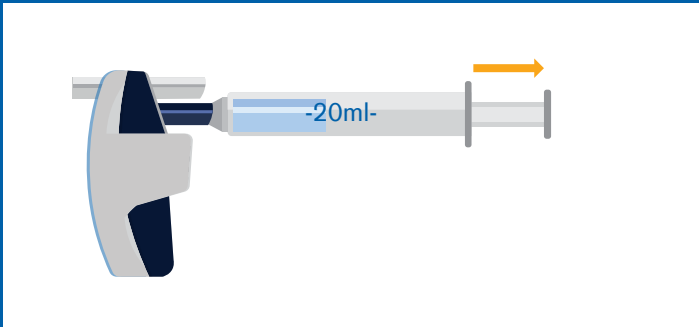

5. Inserte de nuevo la trampa de agua en el soporte o adaptador hasta que encaje de forma audible y conecte la línea de muestra.

ADVERTENCIA Peligro de infección



El líquido del interior de la trampa de agua puede estar contaminado y debe tratarse y eliminarse con cuidado. Deshágase del líquido de forma adecuada y de acuerdo con la normativa local.

ADVERTENCIA Peligro de infección



Si la línea de muestra permanece conectada mientras se retira la trampa de agua, podría escapar líquido contaminado de la trampa de agua. Desconecte la línea de muestra de la trampa de agua antes de retirar la trampa de agua del dispositivo médico.

PRECAUCIÓN Peligro debido a un fallo en la medición de gas



Cuando la trampa de agua está llena, la medición de gas puede fallar. Compruebe el nivel de llenado de la trampa de agua regularmente y vacíela según sea necesario.