

WaterLock® 2

La protección perfecta para la medición precisa de gases. Dräger WaterLock® 2 impide de forma segura que el agua se introduzca en el sensor multigas.

La tecnología de membrana desarrollada por Dräger para el WaterLock 2 impide que las bacterias o los gérmenes se introduzcan en el sistema de medición de gases. El WaterLock 2 también se vacía de forma segura y sencilla, con una ventaja adicional en el manejo y la higiene.

PROTECCIÓN SEGURA FRENTE AL AGUA Y LAS BACTERIAS

Dräger ha diseñado el WaterLock 2 con dos membranas hidrofóbicas en lugar de una sola. Este sistema de protección con doble membrana mantiene la condensación fuera del gas de muestra y del gas de purgado. Incluso si el tubo de muestreo entra en el sistema de aspiración de secreciones, p. ej. durante un cambio de pacientes, no se introduce agua en el sistema de medición de gases. Dos elementos de filtrado autosellantes aumentan la seguridad, ya que cambian a color azul si se obstruyen.

MANEJO SEGURO Y SENCILLO

Todo lo que tiene que hacer para vaciar el WaterLock 2 es retirarlo del soporte, introducir una jeringuilla en el conector y aspirar el agua. Las membranas dobles y el uso de un material especialmente desarrollado para la membrana previenen de forma eficaz que las bacterias o los gérmenes se introduzcan en el sistema de medición de gases.

SEGURO Y ESTABLE: CÓMO FUNCIONA EL WATERLOCK® 2

Los componentes clave del WaterLock 2 son dos filtros hechos con una membrana de PTFE microporosa e hidrofóbica. Esta membrana con un tamaño de poro de sólo 0,2 µm es impermeable para el agua condensada, las bacterias y los gérmenes. No obstante, el gas que debe ser medido puede pasar a través de la membrana con sólo una ligera pérdida de presión. Una bomba succiona este gas.

Un filtro elimina el agua antes de que el gas pase al sensor óptico IR. Se utiliza un segundo flujo de gas succionado a través del depósito de agua y de un segundo filtro para eliminar el agua del primer filtro. Esto impide que el colector de agua se atasque en las peores situaciones. La geometría altamente sofisticada de la carcasa del filtro se ha optimizado para garantizar una respuesta rápida y un drenaje extremadamente eficaz. El resultado es que el Dräger WaterLock 2 mantiene un capnograma perfecto incluso en condiciones extremas, p. ej., en la anestesia de flujo mínimo.



D-10503-2009



D-12331-2009

WaterLock® 2



D-11930-2009

WaterLock® 2, juego de 12 unidades



D-11942-2009

Adaptador del WaterLock® 2 (derecha) para el soporte antiguo del colector de agua (izquierda)



Ponga el adaptador

Atornille el adaptador

Introduzca el nuevo WaterLock® 2

Conecte el tubo de muestreo

AHORRO DE COSTES

El Dräger WaterLock 2 tiene una vida útil máxima de cuatro semanas. Durante este tiempo se puede vaciar y reutilizar tantas veces como sea necesario. Hay disponibles colectores de agua de repuesto en juegos de 12 unidades: el suministro de un año para su estación de trabajo de anestesia.

Nuestro servicio: puede actualizar fácilmente sus estaciones de trabajo de anestesia para el nuevo WaterLock 2 (consulte más arriba las imágenes).

LISTA DE PEDIDOS

	Nº de pedido
WaterLock 2, 12 unid.	6872130
Infinity ID WaterLock 2, 12 unid.	6872020
Adaptador del WaterLock 2 (para el soporte antiguo del colector de agua), 6 unid.	6872128
Juego de actualización WaterLock 2 para Zeus	6872180
Consultar a DrägerService	



SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

FABRICANTE:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100 / Fax -9130

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 48 36 8300
Fax +54 11 48 36 8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 6401
Fax +55 11 41 93 2070

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial
El Cortijo, Conchalí,
Santiago, Chile
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 - Perú
Tel +511 626 95-95 / Fax -73